

CATÁLOGO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

UNIDAD DE PREAMALITICA ACL

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
% PSA LIBRE	PSAL%	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
%CK-MB MASA	MMB%	SUERO	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	SUERO blanca (urgencias)	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	Solicitar en volante de urgencias y extraer sangre en tubo verde de heparina de litio con gel.También suero amarillo CENTRAL
1,25-DIHIDROXI-VITAMINA D	D1.25	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
10 -HIDROXI CARBAZEPINA	OHCARB	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
11 DESOXCORTISOL BASAL	DC11_B	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
11 DESOXCORTISOL TRAS METOPIRONA	DC11_3	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
11 DESOXCORTISOL 2ª MUESTRA	DC11_2M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
11 DESOXCORTISOL EN 3ª MUESTRA	DC11_3M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
11 DESOXCORTISOL EN 4ª MUESTRA	DC11_4M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
11-DESOXCORTICOSTERONA	DOCA	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
11-DESOXCORTISOL	DC11	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
17 HIDROXIPREGNENOLONA EN 2ª MUESTRA	PREG17_2M	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	HOSPITAL	REFERENCE	
17 HIDROXIPREGNENOLONA	PREG17	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
17 HIDROXIPREGNENOLONA BASAL	PREG17_B	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	HOSPITAL	REFERENCE	
17 HIDROXIPREGNENOLONA EN 3? MUESTRA	PREG17_3M	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	HOSPITAL	REFERENCE	
17 HIDROXIPREGNENOLONA EN 4? MUESTRA	PREG17_4M	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	HOSPITAL	REFERENCE	
17 HIDROXIPROGESTERONA NEONATAL	N17OHP	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
17 OH PROGESTERONA 2ª MUESTRA	PR17_2M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
17 OH PROGESTERONA 3ª MUESTRA	PR17_3M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
17 OH PROGESTERONA 4ª MUESTRA	PR17_4M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
17 OH PROGESTERONA 5ª MUESTRA	PR17_5M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
17 OH PROGESTERONA BASAL	PR17_BASAL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
17-HIDROXI-PROGESTERONA	PROG17	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
18 HIDROXICORTICOSTERONA	OHCA_18	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
1-METIL HISTIDINA	L1MHIS	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
1-METIL HISTIDINA	M1_HIS	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
1-METIL HISTIDINA	O1MHIS	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
25-HIDROXI-VITAMINA D	VD25	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
3 METOXI -4 HIDROXIFENILETILENGLICOL EN ORINA 24H	MHPG	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Alicuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
3-METIL HISTIDINA	L3MHIS	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
3-METIL HISTIDINA	M3_HIS	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
3-METIL HISTIDINA	O3MHIS	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
3-METILGLUTARIL CARNITINA C6DC	C6DC	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
3-METILGLUTARIL CARNITINA C6DC EN SANGRE SECA	C6DCCARN_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
3-OH-ISOVALERIL CARNITINA C5OH\C4DC	C5OH_C4DC	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
3-OH-PALMITOIL CARNITINA C16:OH	C16_OH	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
3-OH-PALMITOIL CARNITINA C16:OH EN SANGRE SECA	C16OHCAR_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
5 ALFA DIHIDROTESTOSTERONA	DHT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
7-DEHIDROCOLESTEROL	E_7DHCOLES	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
8(9) -COLESTENOL	E_8_9COLES	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
9 HIDROXI RISPERIDONA	OHRISPER	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
A VANILMANDELICO UR/CREATININA	AVM.CR	ORINA ACIDA aislada	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	HOSPITAL	Hormonas	Niños con dificultad para recoger orina de 24 h. La muestra de orina se acidificará en el lab de Hormonas
A. ALFA AMINOADÍPICO	ADIPIC	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
A. ALFA AMINOBUÉTIRICO	ABUTIR	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
A. GAMMA AMINOBUÉTIRICO	G_BUTI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
A. HOMOVANILLICO UR/CREATININA	AHV.CR	ORINA ACIDA aislada	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	HOSPITAL	Hormonas	Niños con dificultad para recoger orina de 24 h. La muestra de orina se acidificará en el lab de Hormonas
A. RENINA CAVA 1	RCAV1	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar CAVA 1 en el tubo
A. RENINA CAVA 2	RCAV2	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar CAVA2 1 en el tubo
A. RENINA RI?ON DCHO 1	RRD1	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar RIÑON DERECHO 1 en el tubo
A. RENINA RI?ON DCHO 2	RRD2	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar RIÑON DERECHO2 en el tubo
A. RENINA RI?ON IZQDO 1	RR1	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar RIÑON IZQUIERDO 1 en el tubo
A. RENINA RI?ON IZQDO 2	RR2	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar RIÑON IZQUIERDO 2 en el tubo
ABE- EXCESO DE BASE	ABEC.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
AC HETERÓFILOS MI	HETER	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
AC. ANTI-HBC	ACHBC	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
AC. ANTI-HBE	ACHBE	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
AC. ANTI-HBS	ACHBS	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
AC. ANTIRECEPTOR DE TSH	TSI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
AC. ANTI-VHA IGG	VHAG	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
AC. ANTI-VHA IGM	VHAM	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
AC. ANTI-VHA TOTAL	VHAT	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
AC. ANTI-VHC HEPATITIS C	VHC	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
AC. ASPÁRTICO	ASPART	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
AC. ASPÁRTICO EN SANGRE SECA	ASPAR_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
AC. CITRICO EN 24 HORAS	CITR24	ORINA ÁCIDA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
AC. E. CHAGAS IGG EIA	TRYPGEIA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
AC. E. CHAGAS IFI	TRYPGIFI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
AC. E.CHAGAS IGM IFI	TRYPMIFI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
AC. FOLICO	FOLI	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
AC. IGG ANTI CITOMEGALOVIRUS	CMV.GT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
AC. IGM ANTI-HBC	ACHBCM	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
AC. OXALICO EN 24 HORAS	OXAL24	ORINA ÁCIDA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
AC. URICO EN L. SINOVIAL	URISIN	SINOVIAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	SINOVIAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
ACETIL CARNITINA C2	C2CAR	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACETIL CARNITINA C2 EN SANGRE SECA	C2CARN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
ACETIL COLINESTERASA ERITROCITARIA	ACOLINESTE	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACETILCOLINESTERASA EN LÍQUIDO AMNIÓTICO	ACHE_LA	Líquido amniótico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Central	
ACETOACETATO EN SUERO	ACETO	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACETONA DEN SANGRE	ACETONA	Sangre EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACETONA EN ORINA	OACETONA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO (ALA)	ALA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACIDO 2- HIDROXIGLUTARICO	A_2HGLUTAR	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO 2-OXOGLUTARICO	A_2OGLUTAR	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO 3- HDROXIPROPIONICO	A_3HPROP	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO 3- HIDROXIBUTIRICO	A_3HBUTIR	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO 3- HIDROXIVALERICOI	A_3HVALER	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO 3-HIDROXIGLUTARICO	A_3HGLUTAR	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO 3-METILGLUTARICO	A_3MGLUTAR	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO 4-HIDROXIBUTIRICO	A_4HBUTIR	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO 5-HIDROXI-INDOLACETICO	HIA	ORINA 24H ACIDA	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
ACIDO ALFA AMINOADÍPICO	OADIPI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ÁCIDO ALFA AMINOADÍPICO	LADIPI	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
ACIDO ALFA AMINOBUTÍRICO	OABUTI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
ÁCIDO ALFA AMINOBUTÍRICO	LABUTI	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
ACIDO CÍTRICO EN PLASMA SEMINAL	LEACIT	SEMEN	Contenedor esteril boca ancha 100ml	Cód. barras blanco	CERHA	REFERENCE	Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA
ÁCIDO COLENOICO EN SUERO	ACOLE_S	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	UAM.MADRID	Requiere autorización e informe clínico
ÁCIDO COLENOICO Y DERIVADOS EN ORINA	ACOLE_O	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	UAM.MADRID (EXCLUSIVO PEDIATRIA)	Requiere autorización e informe clínico
ACIDO ETILMALONICO	A_EMALON	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO FITANICO, SUERO	FITA	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACIDO FÓRMICO EN ORINA	FORMICO	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACIDO FUMARICO	A_FUMARICO	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO GAMMA AMINOBUTÍRICO	OGBUTI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ÁCIDO GAMMA AMINOBUTÍRICO	LGBUTI	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
ACIDO GLICERICO	A_GLICERIC	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ÁCIDO GLICÓLICO (CROMATOGRAFIA GASES) EN ORINA	A_GLICO	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACIDO GLICOLICO (GC/MS-MS)	A_GLICOLIC	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO GLUTÁMICO	ACGLUT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACIDO GLUTÁMICO	OAGLUT	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ÁCIDO GLUTÁMICO	LAGLUT	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ACIDO GLUTARICO	A_GLUTAR	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO HIALURONICO	HIALU	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACIDO HOMOVANILICO	A_HOMOVAN	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO HOMOVANILLICO	AHV	ORINA 24H ACIDA	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
ACIDO LACTICO	A_LAC	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO METIL MALONICO EN ORINA	MMALO_ORI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACIDO METIL MALONICO EN SUERO	MMALO_SUE	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACIDO METILMALONICO	A_MMALON	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO MOFETIL-MICOFENOLICO	MICO	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	Bioq.especial	
ACIDO N-ACETILASPARTICO	A_NAASPAR	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO NMETIL IMIDAZOL ACÉTICO	IMIDACET	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
ACIDO OROTICO (del perfil de aa)	A_ORO	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO OROTICO EN ORINA	A_OROTI	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO OXÁLICO EN SANGRE	OXAL.S	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACIDO PIRUVICO LCR	PIRLCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
ÁCIDO RETINOICO	RETIN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACIDO SALICILICO	AAS	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACIDO SUBERICO	A_SUBER	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDO URICO	URI	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
ACIDO ÚRICO EN 18 HORAS	OURI18	Orina de 18 horas	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ACIDO ÚRICO EN 24 HORAS	OURI24	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
ACIDO URICO EN ORINA	OURI	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
ACIDO VALPROICO	VALP	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	
ACIDO VANILMANDELICO	AVM	ORINA 24H ACIDA	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
ACIDOS BILIARES	A_BILIAR	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACIDOS GRASOS CADENA MUY LARGA EN SUERO (PERFIL)	AGCML	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACIDOS GRASOS LIBRES (NEFA)	AGL	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACIDOS ORGANICOS EN ORINA (PERFIL REFERENCE)	A_ORGANIC	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
ACIDOS ORGANICOS EN ORINA (IBC)	A_ORG	ORINA (congelada)	(*) 4 Tubos 10 ml ORINA	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	IBC .(EXCLUSIVO PEDIATRIA)	Requiere autorización e informe clínico. 30 ml mínimo (3-4 tubos muestra)
ACIL CARNITINAS EN SUERO/PLASMA PERFIL (REFERENCE)	ACILCAR	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ACLARAMIENTO DE ALFA1 ANTITRIPSINA FECAL (PERFIL)	ACLA_A1AT	HECES 24 horas	Cont.heces 24 H	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Contenedor para heces de boca ancha
ACLARAMIENTO DE CREATININA EN ORINA	ACLAR	ORINA 24 HORAS	(*)Tubo 10 ml ORINA +Tubo de suero tapón AMARILLO	BIORIN +DIURESIS + SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Requiere extracción de tubo de SUERO AMARILLO de 7ml para CREATININA y recogida de orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
ACS. ANTI ADRENAL	ADREN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI Ag. SOLUBLE HEPÁTICO	SLA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI ANFIFISINA	FIFIS	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI ANFIFISINA EN LCR	FIFIS.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI ASIALO-GM1-IgG	ASIALOGM1G	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI ASIALO-GM1-IgG EN LCR	ASIALOGLCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ACS. ANTI ASIALO-GM1-IgM	ASIALOGM1M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI ASIALO-GM1-IgM EN LCR	ASIALOMLCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI B2-GLICOPROTEINA I IgG	B2GP	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI B2-GLICOPROTEINA I IgM	B2GPM	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI CARDIOLIPINA IgG	ACAG	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI CARDIOLIPINA IgM	ACAM	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI CASP2 (PROTEÍNA ASOCIADA A CANALES DE POTASIO) LCR	CASP2_L	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI CASP2 (PROTEÍNA ASOCIADA A CANALES DE POTASIO) SUERO	CASP2_S	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI CÉLULAS PARIETALES	ACPG	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI CENTRÓMERO	CENTR	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS	ANCA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI COCLEARES	COCLE	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI CV2/CRMP5	CV2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI CV2/CRMP5 EN LCR	CV2.LCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI DNAn	DNA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI EJ	EJ	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI ENDOMISIO IgA	EMA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI ENDOMISIO IgG	EMAG	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI ENDOTELIO	ENDOT	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ACS. ANTI F-ACTINA	ACTIN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI FACTOR INTRÍNSECO	FI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GAD 65 EN LCR	GAD_LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GAD 67	GAD67	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GD1a-IgG	GD1AG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GD1a-IgG EN LCR	GD1AG.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GD1a-IgM	GD1AM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GD1a-IgM EN LCR	GD1AM.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GD1b-IgG	GD1BG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GD1b-IgG EN LCR	GD1BG.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GD1b-IgM	GD1BM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GD1b-IgM EN LCR	GD1BM.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GLIADINA DEAMINADA IgG	AGAG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GLIADINA IgA	AGAA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GLUTAMATO DESCARBOXILASA	GAD	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GLUTATION-S- TRANSFERASA T1	GSTT1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GM1-IgG	GM1.G	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GM1-IgG en LCR	GM1.G.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ACS. ANTI GM1-IgM	GM1.M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GM1-IgM en LCR	GM1.M.LCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GM2-IgG	GM2.G	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GM2-IgG en LCR	GM2.G.LCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GM2-IgM	GM2.M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GM2-IgM en LCR	GM2.M.LCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GP210	GP210	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GQ1b-IgG	GQ1BG	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GQ1b-IgG EN LCR	GQ1BG.LCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GQ1b-IgM	GQ1BM	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI GQ1b-IgM EN LCR	GQ1BM.LCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI HISTONA	HISTO	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI HU	HU	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI HU EN LCR	HU.LCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI INSULINA	IAA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI ISLOTES PANCREÁTICOS	ICA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI JO-1	JO1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI Ku	KU	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ACS. ANTI LC-1	LC1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI LGI1 (PROTEÍNA ASOCIADA A CANALES DE POTASIO) LCR	LGI1_L	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI LGI1 (PROTEÍNA ASOCIADA A CANALES DE POTASIO) SUERO	LGI1_S	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI LINFOCITARIOS	ALIN	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI LKM1	LKM	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI M2	AM2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI Ma2/Ta	MA2.T	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI Ma2/Ta EN LCR	MA2.LCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI MEMBRANA BASAL EPIDÉRMICA	MBE	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI MEMBRANA BASAL GLOMERULAR	MBG	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI MEMBRANA BASAL TUBULAR	MBT	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI MITOCONDRIALES	AMA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI MPO	MPS	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI MÚSCULO LISO	ASMA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI NUCLEARES	ANA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI OJ	OJ	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI PÉPTIDO CITRULINADO	CCP	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI PL12	PL12	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI PL7	PL7	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI PML	PML	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ACS. ANTI PM-Scl	PMSCL	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI RECEPTOR DE FOSFOLIPASA A2	PLA2R	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI RECOVERINA	RECOVERINA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI RECOVERINA EN LCR	RECOV_LCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI RI	RI	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI RI EN LCR	RI.LCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI RIBOSOMAL	RIBOS	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI RNP	RNP	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI RNP-70	RNP70	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI Ro52	Ro52	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI Ro60	Ro60	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI SCL-70	SCL70	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI Sm	SM	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI SOX1	SOX1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI SP100	SP100	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI SSA/Ro (Ro60+Ro52)	SSA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI SSB/LA	SSB	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI SUSTANCIA INTERCELULAR	SIC	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI TIROGLOBULINA	ATG	SUERO	Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI TPO	AMC	SUERO	Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ACS. ANTI Tr	TR	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI Tr EN LCR	TR.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI TRANSGLUTAMINASA IgA	ATGT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI U1RNP	RNU1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI YO	YO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI YO EN LCR	YO.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI Zic4	ZIC4	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTIGRANULOCITOS (T.INDIRECTO)	AGRAN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI-Mi-2	AA_MI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI-PROTEINASA 3	PRS	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI-RECEPTOR NMDA en Suero	NMDA_S	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI-TIROSINA FOSFATASA	IA2	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTI-TITINA	AA_TITINA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. ANTITRANSGLUTAMINASA IgG	ATGG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. CITÓXICOS ANTI HLA-I	ACHLAI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACS. CITÓXICOS ANTI HLA-II	ACHLAI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ACTH	ACTH	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	Hormonas	
ACTH 2ª MUESTRA	ACTH.2M	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ACTH 3ª MUESTRA	ACTH.3M	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ACTH 4ª MUESTRA	ACTH.4M	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ACTH 5ª MUESTRA	ACTH.5M	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ACTH 6ª MUESTRA	ACTH.6M	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ACTH 7ª MUESTRA	ACTH.7M	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ACTH 8ª MUESTRA	ACTH.8M	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ACTH A LAS 20 HORAS	ACTHN	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	Hormonas	Indicar en el tubo que es la muestra de las 20 horas.
ACTH SENO PETROSO DERECHO 1ª (-15 MIN)	ACTH_6	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
ACTH SENO PETROSO DERECHO 2ª (0 MIN)	ACTH_7	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
ACTH SENO PETROSO DERECHO 4ª (+5 MIN)	ACTH_9	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
ACTH SENO PETROSO IZQUIERDO 5ª (+10 MIN)	ACTH_5	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
ACTH SENO PETROSO DERECHO 3ª (+3 MIN)	ACTH_8	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
ACTH SENO PETROSO DERECHO 5ª (+10 MIN)	ACTH_10	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
ACTH SENO PETROSO IZQUIERDO 3ª (+3 MIN)	ACTH_3	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
ACTH SENO PETROSO IZQUIERDO 4ª (+5 MIN)	ACTH_4	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
ACTH SENO PETROSO IZQUIERDO 1ª (-15 MIN)	ACTH_1	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
ACTH SENO PETROSO IZQUIERDO 2ª (0 MIN)	ACTH_2	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
ACTH TRAS DEXAMETASONA	ACTHDX	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Hormonas	Indicar en el tubo que es muestra tras estímulo.
ACTH TRAS METOPIRONA	ACTH.METO	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ACTH VENA PERIFÉRICA 1ª (-15 MIN)	ACTH_11	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
ACTH VENA PERIFÉRICA 2ª (0 MIN)	ACTH_12	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
ACTH VENA PERIFÉRICA 3ª (+3 MIN)	ACTH_13	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
ACTH VENA PERIFÉRICA 4ª (+5 MIN)	ACTH_14	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ACTH VENA PERIFÉRICA 5ª (+10 MIN)	ACTH_15	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
ACTIVIDAD (TP)	TP%	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
ACTIVIDAD (TP)	TP%.S	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
ACTIVIDAD DE PHTR	DHPR	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Hosp.San Juan de Dios	Requiere autorización e informe clínico
ADA LÍQUIDO ASCITICO	ADAASC	LIQ. ASCITICO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Bioq.especial	
ADA LÍQUIDO BIOLÓGICO	ADABIO	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Bioq.especial	
ADA EN L. PLEURAL	ADAPLE	Líquido pleural	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Bioq.especial	
ADA EN L. SINOVIAL	ADASIN	Líquido sinovial	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Bioq.especial	
ADA EN LCR	ADALCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Bioq.especial	
ADA EN LÍQUIDO PERITONEAL	ADAPER	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PERITONEAL blanco	HOSPITAL	Bioq.especial	
ADA LÍQUIDO PERICARDICO	ADAPC	Líquido pericárdico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Bioq.especial	
ADAMTS 13 ACTIVIDAD	ADAMTS_ACT	PLASMA CITRATO CONGELADO	Tubo CITRATO Tapón AZUL	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
ADENOSINA DESAMINASA	ADA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
ADENOVIRUS IGG	ADENOG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
ADENOVIRUS IGM	ADENOM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
ADRENALINA PLASMATICA	ADRENA	Plasma EDTA congelado	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ADRENALINA UR./CRETININA	A.CR	ORINA ACIDA aislada	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	HOSPITAL	Hormonas	Niños con dificultad para recoger orina de 24 h. La muestra de orina se acidificará en el lab de Hormonas
ADRENALINA URINARIA	OADREN	ORINA 24H ACIDA	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
AFP	AFP	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
AFP LIQUIDO ASCITICO	AFP_ASC	LIQ. ASCITICO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Central	
AFP EN LIQUIDO PLEURAL	AFP_PLE	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Lab.Central	
AFP EN LÍQUIDO BIOLÓGICO	AFP_BIO	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
AFP LÍQUIDO AMNIOTICO	AFP_LA	Líquido amniótico	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
AG CRIPTOCÓCICO	AGCRIP	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
AG CRIPTOCÓCICO LCR	AGCRIP.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
AGHBE	AGHBE	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
AGHBS	AGHBS	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
AGLUTINACIÓN DE BRUCELLA EN LCR	BRUAGL.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
AGREG. RISTOCETINA CFC 1.2 MG/DL	AG12	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
AGREG. RISTOCETINA CFC 1.5MG/ML	AG15	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
AGREG. RISTOCETINA CFC 1MG/DL	AG1	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
AGREGACIÓN ADP	AADP	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
AGREGACIÓN CON ARAQUIDÓNICO	AARQ	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
AGREGACIÓN CON COLÁGENO	ACOL	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
AGREGACIÓN CON EPINEFRINA	AEPI	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
AGREGACIÓN PLAQUETARIA ESTUDIO (PERFIL)	EAP	SANGRE	(*)6 Tubos CITRATO Tapón AZUL	Numero pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 6 tubos de CITRATO AZUL
AGUA EN HECES	AGUA.H	HECES DE 24 HORAS	Cont.heces 24 H	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Contenedor para heces de boca ancha
ALANINA	LALAN	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
ALANINA	ALANIN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ALANINA	OALAN	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ALANINA EN SANGRE SECA	ALANI_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
ALBUMINA	ALB	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
ALBUMINA (ASC)	ALBASC.U	ASCITICO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	ASCITICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
ALBUMINA LIQUIDO BIOLÓGICO	ALBBIO.U	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
ALBUMINA LIQUIDO PLEURAL	ALBPLE.U	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
ALCOHOLEMIA EN SANGRE (JUDICIALES)	ALCOHOL	SANGRE TOTAL FLUORURO-OXALATO	*(2)TUBOS DE FLUORURO/OXALATO GRIS	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Instituto Toxicologico de Sevilla	SOLO PARA ALCOHOLEMIA DE ORDEN JUDICIAL. Requiere formulario de remisión de muestras al I.Toxicológico de Sevilla, orden judicial y registro de recepción e incidencias.
ALDOLASA	ALDO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ALDOSTERONA	ALDOST	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	Hormonas	
ALDOSTERONA 2? MUESTRA	ALDOST.2M	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ALDOSTERONA 3? MUESTRA	ALDOST.3M	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ALDOSTERONA CAVA 1	ACAV1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ALDOSTERONA CAVA 2	ACAV2	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ALDOSTERONA POST ESTIMULO	ALDOSTPOS	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ALDOSTERONA RIÑON DCHO 1	ARD1	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar RIÑON DERECHO1 en el tubo
ALDOSTERONA RIÑON DCHO 2	ARD2	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar RIÑON DERECHO2 en el tubo
ALDOSTERONA RIÑON IZQDO 1	ARI1	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar RIÑON IZQUIERDO 1 en el tubo
ALDOSTERONA RIÑON IZQDO 2	ARI2	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar RIÑON IZQUIERDO 2 en el tubo
ALDOSTERONA URINARIA	OALDO	ORINA 24 HORAS (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
ALFA 1 ANTITRIPSINA	A1AT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteína/marcadores	
ALFA 1 ANTITRIPSINA EN HECES	A1AT.H	HECES	Conten.Heces 100ml	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ALFA 1 GLUCOPROTEINA ACIDA	A1GPA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ALFA 2 MACROGLOBULINA	A2MG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteína/marcadores	
ALFA FETOPROTEÍNA EN LCR	AFP_LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Lab.Central	
ALFA FETOPROTEINA TRIPLE SCREENING EMBARAZO	AFP_TS	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde
ALFA GLUCOSIDASA NEUTRA	LEMALT	SEMEN	Contenedor esteril boca ancha 100ml	Cód. barras blanco	CERHA	REFERENCE	Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA
ALFA HIDROXIBUTIRICO DESHIDROGENASA	AH_BUTIRI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ALFA TALASEMIA MUTACIONES	ALFA_TALA	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ALFA1 ANTITRIPSINA EN SUERO	A1AT_SUE	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ALFA1 MICROGLOBULINA EN ORINA	OA1MG	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ALLO_Isoleucina	ALLOILEU	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ALMIDON EN HECES	ALMID	HECES DE 24 HORAS	Cont.heces 24 H	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Contenedor para heces de boca ancha
ALUMINIO	AL	SUERO	Tube suero Tapón AZUL oscuro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere tubo especial con silicona Trace tapón AZUL oscuro
ALUMINIO EN AGUA DE DIÁLISIS	AL_AGUA	AGUA DIALISIS	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
ALUMINIO EN ORINA	OAL	ORINA AISLADA	Tube 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
ALUMINIO- LIQUIDO DE DIALISIS	ALULIQ	AGUA DIALISIS	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
AMANITINAS (AMATOXINAS EN ORINA)	AMATOX	ORINA AISLADA	Tube 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
AMIKACINA	AMIKA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
AMILASA	AMI	SUERO	Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
AMILASA	AMIASC.U	ASCITICO	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	ASCITICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
AMILASA EN 18 HORAS	OAMI18	Orina de 18 horas	Tube 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
AMILASA EN 24 HORAS	OAMI24	ORINA 24 HORAS	Tube 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
AMILASA EN ORINA	OAMI	ORINA AISLADA	Tube 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
AMILASA LÍQUIDO BIOLÓGICO	AMIBIO.U	L.Biológico	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
AMILASA LIQUIDO PLEURAL	AMIPLE.U	PLEURAL	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
AMILASA PANCREATICA	AMIPAN	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
AMINOACIDOS EN LCR (PERFIL)	AA_LCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
AMINOÁCIDOS EN ORINA LC/MS-MS (PERFIL)	AA_ORINA	ORINA AISLADA	Tube 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
AMINOÁCIDOS EN ORINA NEONATAL	NAMIN_O	ORINA AISLADA	Tube 10 ml orina	BIORIN amarilla	HOSPITAL	Metabolismo	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
AMINOÁCIDOS EN SUERO LC/MS-MS (PERFIL)	AA_SUERO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
AMINOACIDOS Y ACILCARNITINAS EN SANGRE SECA (PERFIL)	AAACTANDEM	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	
AMIODARONA	AMIOD	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
AMONIO	AMON	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
AMONIO	OAMONI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
AMONIO (LCR)	AMONLC.U	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
AMONIO 1 MINUTO	AMONIO1	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Número pequeño	HPS	Lab.Urgencias	Prueba funcional. Requiere tubo heparina verde CON GEL Solicitar cita en el Lab.Urg del HPS 46183.Indicar orden y tiempo de muestra en cada tubo
AMONIO 10 MINUTOS	AMONIO10	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Número pequeño	HPS	Lab.Urgencias	Prueba funcional. Requiere tubo heparina verde CON GEL Solicitar cita en el Lab.Urg del HPS 46183.Indicar orden y tiempo de muestra en cada tubo
AMONIO 20 MINUTOS	AMONIO20	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Número pequeño	HPS	Lab.Urgencias	Prueba funcional. Requiere tubo heparina verde CON GEL Solicitar cita en el Lab.Urg del HPS 46183.Indicar orden y tiempo de muestra en cada tubo
AMONIO 3 MINUTOS	AMONIO3	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Número pequeño	HPS	Lab.Urgencias	Prueba funcional. Requiere tubo heparina verde CON GEL Solicitar cita en el Lab.Urg del HPS 46183.Indicar orden y tiempo de muestra en cada tubo
AMONIO 5 MINUTOS	AMONIO5	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Número pequeño	HPS	Lab.Urgencias	Prueba funcional. Requiere tubo heparina verde CON GEL Solicitar cita en el Lab.Urg del HPS 46183.Indicar orden y tiempo de muestra en cada tubo
AMONIO BASAL	AMONIOB	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Número pequeño	HPS	Lab.Urgencias	Prueba funcional. Requiere tubo heparina verde CON GEL Solicitar cita en el Lab.Urg del HPS 46183.Indicar orden y tiempo de muestra en cada tubo
AMP CICLICO PLASMATICO	AMPC	Plasma EDTA congelado	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
AMP CICLICO URINARIO	OAMPC	ORINA 24 HORAS (congelada)	Tube 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
ANÁLISIS GENOTIPADO ARRAY CGH	ARRAYCGH	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tube EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ANÁLISIS CGH DE PROCESOS HEMATOLÓGICOS	FSH32	SANGRE	Tube HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ANDROSTANDIOL GLUCURONIDO	ADIOL	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANDROSTENDIONA	ANDROS	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
ANDROSTENDIONA 2ª MUESTRA	ANDROS_2M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ANDROSTENDIONA 3ª MUESTRA	ANDROS_3M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ANDROSTENDIONA 4ª MUESTRA	ANDROS_4M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ANDROSTENDIONA 5ª MUESTRA	ANDROS_5M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ANEUPLOIDÍAS ESPERMATOZOIDES FISH SEMEN	ESPER_FISH	SEMEN	Contenedor esteril boca ancha 100ml	Cód. barras blanco	HPS	REFERENCE	Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA
ANFETAMINAS	OANFE	ORINA AISLADA	Tube 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
ANGIOTENSINA (ACTIVIDAD RENINA PLASMÁTICA)	ANGIO	Plasma EDTA congelado	Tube EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	Evitar muestras de plasma heparina y citrato.
ANIÓN GAP	GAP.U	SUERO	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	Requiere tubo de heparina de litio con gel tapón verde claro y gasometría
ANSERINA	LANSER	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
ANSERINA	ANSER	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANSERINA	OANSER	ORINA AISLADA	Tube 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTETAMINAS EN SALIVA	ANFE_SAL	Saliva	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTIC. LUPICO	CALU	SANGRE	(*)3Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
ANTICOAGULANTE LUPICO ESTUDIO (PERFIL)	ALUP	SANGRE	(*)4Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 4 tubos de CITRATO AZUL

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ANTICOGULACION ORAL/ INTRAVENOSA (PERFIL)	HEPA.S	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
ANTICUERPOS ANTI 21-HIDROXILASA	AA_HIDROXI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ESPERMATOZOIDE L. ESP	AAESPL	SEMEN	Contenedor esteril boca ancha 100ml	Cód. barras blanco	CERHA	REFERENCE	Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA
ANTICUERPOS ESTREPTODORNASA (DNAASA B)	AA_DNASAS	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS MAG IGM (MYELIN ASOCIATED GLYCOPROTEIN)	AAMAG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ALFA ENOLASA	AA_NSE	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE ASIALOGLICOPROTEÍNA	ASGPR	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI CÁPSULAS SUPRARRENALES	AASUPRA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI CÉLULAS CALICIFORMES (GLOBET CELLS)	AACALICI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI ENTEROCITOS IGA	AAENTERO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI HIPOFISIS	AAHIPO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI HMGCR (HMG-CO REDUCTASA)	AA_HMGCR	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI IGA	AA_IGA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI LACTOFERRINA	AA_LACTOFE	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI MAG EN LCR	AAMAG_LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI MUSCULO ESTRIADO	AAMUS_ESTR	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI NATALIZUMAB	AA_NATALI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI P155	AA_P155	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI PLAQUETAS (DIRECTO)	AA_PLA.DIR	SANGRE TOTAL (EDTA)	(*)5 Tubos EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	REFERENCE	Se requieren 5 tubos de EDTA (15 ml de sangre total EDTA.)Si el recuento de palquetas es <20000, enviar 25 ml de sangre .

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ANTICUERPOS ANTI PLAQUETAS (INDIRECTO)	AA_PLA.IND	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI- RECEPTOR INSULINA	AARINS	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI SRP (Signal Recognition Particle)	AA_SRP	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ANTICUERPOS ANTI SULFATIDOS IGM+GANGLIÓSIDOS	SULFATI_M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI VHC	VHC_REF	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI-ADAMTS- 13 (INHIBIDOR)	ADAMTS13	PLASMA CITRATO CONGELADO	Tubo CITRATO Tapón AZUL	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI-ANHIDRASA CARBONICA	AA_A.CARBO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTIESPERMATOZOIDES IGA (MAR-TEST)	MAR_A	SEMEN	Contenedor esteril boca ancha 100ml	Cód. barras blanco	CERHA	REFERENCE	Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA
ANTICUERPOS ANTIESPERMATOZOIDES IGG (MAR-TEST)	MAR_G	SEMEN	Contenedor esteril boca ancha 100ml	Cód. barras blanco	CERHA	REFERENCE	Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA
ANTICUERPOS ANTI-FASCIOLA HEPATICA	FASCIO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
ANTICUERPOS ANTIGANGLIÓSIDOS IGG EN LCR	GT1AG_LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTIGANGLIÓSIDOS IGG EN SUERO	GT1AG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTIGANGLIÓSIDOS IGM EN LCR	GT1AM_LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTIGANGLIÓSIDOS IGM EN SUERO	GT1AM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTIMICELIO	MICEL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
ANTICUERPOS ANTI-MUSK (QUINASA ESPECÍFICA MUSCULAR)	AAMUSK	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI-OVARIO	AAOVA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ANTI-RECEPTOR N-METIL-D-ASPARTATO (NMDA) en LCR	AA_NMDA	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ANTICUERPOS CANALES DE CALCIO	AC_CANCA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS CANALES DE POTASIO LCR	AC_CANKLCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS CANALES DE POTASIO SUERO	AC_CANK	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS DNA DESNATURALIZADO (SS/DNA)	SSDNA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS DPPX EN SUERO	DPPX_S	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ERITROPOYETINA	AA_ERITRO	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS ESPERMATOZOIDE	AAESP	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS HTLV I Y HTLV II	HTLV	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
ANTICUERPOS HTLV I Y HTLV II EN LCR	HTLV.LCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
ANTICUERPOS IGG A ALTERNARIA ALTERNATA	IGG_ALTER	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS IGG CLADOSPORIUM HERBARUM	IGG_CLADOS	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS IGG CONTROL VACUNACIÓN RABIA	RABIA_G	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS IGG MUCOR RACEMOSUS	IGG_MUCOR	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS IGG NMO (ACUAPURINA 4)	AC_NMO	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS IGG NMO EN LCR	AC_NMOLCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS MGLUR5 EN LCR	MGLUR5	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS MGLUR5 EN SUERO	MGLUR5_S	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS MOG (MILELINA OLIGODENDROCITO GLICOPROTEÍNA)	MOG_S	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ANTICUERPOS PF4 (FACTOR PLAQUETARIO 4 -HEPARINA)	AA_FPLA4	PLASMA CITRATO CONGELADO	(*) 2 Tubos CITRATO Tapón AZUL	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	Se requieren 2 tubos de CITRATO AZUL
ANTICUERPOS RECEPTOR AMPA2 EN LCR	AMPA2_L	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ANTICUERPOS RECEPTOR AMPA2 EN SUERO	AMPA2_S	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ANTICUERPOS RECEPTOR GLICINA EN SUERO	GLICINA_S	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS RECEPTOR RIANODINA	AA_RIANO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS RECEPTORES ACETILCOLINA	AARAC	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS RECEPTORES AMPA1 EN LCR	AMPA_L	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ANTICUERPOS RECEPTORES AMPA1 SUERO	AMPA_S	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ANTICUERPOS RECEPTORES GABA EN LCR	AA_GABA	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ANTICUERPOS RECEPTORES GABA EN SUERO	GABA_S	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ANTICUERPOS T3 TRIYODOTIRONINA	ANTI_T3	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTICUERPOS T4 TIROXINA	ANTI_T4	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS	OADT	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS	TRICI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS ORINA CUANTI	OTRICI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTIESTREPTOLISINA O	ASLO	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
ANTÍGENO ASOCIADO A TUMOR DE VEGIJA	BTA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTIGENO CA 72.4	CA72.4	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTIGENO P24	AGP24	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ANTIGENO POLIPEPTÍDICO TISULAR (TPA)	TPA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTIMONIO SANGRE TOTAL	SB	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ANTI-SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IgA	ASCA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ANTI-SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IgG	ASCAG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ANTITROMBINA III (CROMOGENICA)	ATCRO	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
ANTITROMBINA III ANTIGÉNICA	ATGEN	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
APOLIPO. A1 / APOLIPO B	A1.B	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
APOLIPOPROTEINA A1	APOA1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
APOLIPOPROTEINA B	APOB	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
APOLIPOPROTEINA C2	APOC2	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
APOLIPOPROTEINA C3	APOC3	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
APOLIPOPROTEINA E	APOE	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ARGININA	LARGIN	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
ARGININA	ARGIN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ARGININA	OARGIN	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ARGININA EN SANGRE SECA	ARG_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
ARGININA EN SANGRE SECA	ARG_SS_IMP	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
ARILSULFATASA A EN LEUCOCITOS EN SANGRE TOTAL	ARILSULFA	Sangre heparina	(*3 Tubos HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	Requiere cita en el laboratorio, 3 tubos de Heparina sin gel tapón verde oscuro, INFORME CLÍNICO y sangre control de otro paciente.
ARSENICO EN ORINA	OAS	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ARSÉNICO EN ORINA POR G CREATININA	OAS_CRE	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ARSENICO SANGRE	AS	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ASPARRAGINA	LASPAR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
ASPARRAGINA	ASPARR	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ASPARRAGINA	OASPAR	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ASPÁRTICO	LASP	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
ASPÁRTICO	OASP	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ASPECTO (SINOV)	ASPSIN.U	SINOVIAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
ASPECTO LIQUIDO PERITONEAL DIALISIS	ASPPER.U	PER DIALIS	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
ASPECTO LIQUIDO PLEURAL	ASPPLE.U	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
AVIDEZ CITOMEGALOVIRUS IGG	AVIDEZCMV	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
AVIDEZ TOXOPLASMOSIS	AVIDEZ	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
AZUCAR EN HECES	AZUC	HECES DE 24 HORAS	Cont.heces 24 H	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Contenedor para heces de boca ancha
BABESIA SPP . PCR SANGRE TOTAL	BABESIA	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
BANDAS OLIGOCLONALES IGG EN LCR	BAND.L	LCR CONGELADO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Proteinas/marcadores	
BANDAS OLIGOCLONALES IGM EN LCR	BAND.LM	LCR CONGELADO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Proteinas/marcadores	
BANDAS OLIGOCLONALES IGG EN SUERO	BAND.S	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	HOSPITAL	Proteinas/marcadores	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
BANDAS OLIGOCLONALES IGM EN SUERO	BAND.SM	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	HOSPITAL	Proteinas/marcadores	
BARBITURICOS	OBARB	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
BARTONELLA HENSELAE IGG	BARHEG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
BARTONELLA QUINTANA IGG	BARQG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
BASÓFILOS	BAS%	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
BASÓFILOS (VALOR ABS.)	BAS#	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
BENZODIACEPINAS	OBENZ	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
BENZOECGONINA EN SALIVA	BENZCG_SAL	Saliva	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
BETA 2 MICROGLOBULINA EN LCR	B2MG_LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Hormonas	
BETA 2 TRANSFERRINA	B2TRF	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
BETA ALANINA	LBALAN	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
BETA ALANINA	B_ALAN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
BETA ALANINA	OBALAN	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
BETA AMINOISOBUTÍRICO	LBBUTI	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
BETA AMINOISOBUTÍRICO	B_ISOB	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
BETA AMINOISOBUTÍRICO	OBBUTI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
BETA CAROTENO	BETA_CARO	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
BETA CROSSLAPS	CROSSLAPS	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
BETA- TRACEPROTEINA	B_TRAZA	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
BETA-2-MICROGLOBULINA	B2MG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
BETA-2-MICROGLOBULINA ORINA	OB2MG	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
BETA-COLESTANOL	E_BCOLESTA	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
BETA-D-GLUCANO	BGLUC	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
BHCG	BHCG	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
BHCG EN L.PLEURAL	BHCG_PLE	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Lab.Central	
BHCG EN LCR	BHCG_LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Lab.Central	
BHCG EN SUERO (CERHA)	BHCG.U	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	
BHCG LIBRE TRIPLE SCREENING EMBARAZO	BETA1T	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina lito con gel tapón verde
BHCG LÍQUIDO BIOLÓGICO	BHCG_BIO	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
B-HIDROXIBUTIRATO	BHIDRO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
BICARBONATO EN ORINA	HCO3_ORI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
BILIRRUBINA DIRECTA	BD	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
BILIRRUBINA DIRECTA LÍQUIDO BIOLÓGICO	BILDBI	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
BILIRRUBINA INDIRECTA	BI	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
BILIRRUBINA TIRA DE ORINA	BILI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
BILIRRUBINA TOTAL	BT	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
BILIRRUBINA TOTAL LÍQUIDO BIOLÓGICO	BILTBI	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
BIOTINA (VITAMINA H)	VITH	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
BIOTINIDASA PLASMA	BIOTIN	Plasma EDTA congelado	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	
BORDETELLA PARAPERTUSSIS IGG	BORPAR	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
BORDETELLA PARAPERTUSSIS IGM	BORPARM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
BORDETELLA PERTUSIS IGG	BORPERG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
BORDETELLA PERTUSIS IGM	BORPERM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
BORRELIA BURDOGFERI	BORREL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
BORRELIA BURDOGFERI EN LCR	BORREL.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
BRUCELLA (AGLUTINACION)	BRUAGL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
BRUCELLA (COOMBS)	BRUCOO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
BUPRENORFINA	BUP	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
BUTIRIL CARNITINA C4	C4CAR	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
BUTIRIL CARNITINA C4 EN SANGRE SECA	C4CARN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
C. LIGERAS KAPPA EN ORINA	OKAPPA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcado res	
C. LIGERAS KAPPA EN ORINA DE 24 HORAS	OKAPPA24H	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcado res	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
C. LIGERAS LAMBDA EN ORINA	OLAMDA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcado res	
C. LIGERAS LAMBDA EN ORINA 24 HORAS	OLAMDA24H	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcado res	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
C. LIGERAS LIBRES KAPPA ORINA	OKAPPL	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcado res	
C. LIGERAS LIBRES LAMBDA ORINA	OLAMD	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcado res	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
C14:2 CARNITINA EN SANGRE SECA	C142CARN_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
C14:OH CARNITINA	C14_OH	SUERO CONGELADO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
C14:OH CARNITINA EN SANGRE SECA	C14OHCAR_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
C16:1-OH CARNITINA EN SANGRE SECA	C161OHCA_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
C18:1 CARNITINA	C18_1	SUERO CONGELADO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
C18:1 CARNITINA EN SANGRE SECA	C181CARN_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
C18:1:OH CARNITINA	C18_1_OH	SUERO CONGELADO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
C18:1-OH CARNITINA EN SANGRE SECA	C181OHCA_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
C18:2 CARNITINA	C18_2	SUERO CONGELADO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
C18:2 CARNITINA EN SANGRE SECA	C182CARN_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
C18:OH CARNITINA	C18_OH	SUERO CONGELADO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
C18-OH CARNITINA EN SANGRE SECA	C18OHCAR_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
C22:0	C22_0	SUERO CONGELADO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
C24_0	C24_0	SUERO CONGELADO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
C24_0C22_0	C24_0C22_0	SUERO CONGELADO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
C26_0	C26_0	SUERO CONGELADO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
C26_0C22_0	C26_0C22_0	SUERO CONGELADO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
C3 COMPLEMENTO SUERO	C3C	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
C3A ACTIVADOR COMPLEMENTO C3 SUERO	C3A	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
C4 COMPLEMENTO SUERO	C4	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
C4DC CARNITINA	C4DC	SUERO CONGELADO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
C4DC CARNITINA EN SANGRE SECA	C4DCCARN_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
C4OH C3DC CARNITINA EN SANGRE SECA	C4OH_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
C4OH\C3DC CARNITINA	C4OH_C3DC	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
C5:1 CARNITINA EN SANGRE SECA	C51CARN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
C5OH C4DC CARNITINA EN SANGRE SECA	C5OH_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
C8:1 CARNITINA	C8_1	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
C8:1 CARNITINA EN SANGRE SECA	C81CARN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
CA 12.5	CA125	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
CA 12.5 LÍQUIDO BIOLÓGICO	CA125BIO	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
CA 12.5 EN LIQUIDO ASCÍTICO	CA125ASC	ASCITICO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Central	
CA 12.5 LIQUIDO PLEURAL	CA125PLE	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Lab.Central	
CA 15.3	CA153	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
CA 15.3 LIQUIDO PLEURAL	CA153PLE	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Lab.Central	
CA 153 EN LIQUIDO ASCITICO	CA153ASC	ASCITICO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Central	
CA 19.9	CA199	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
CA 19.9 EN LÍQUIDO ASCÍTICO	CA199ASC	ASCITICO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	ASCITICO blanca	HOSPITAL	Lab.Central	
CA 19.9 EN LÍQUIDO BIOLÓGICO	CA199BIO	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
CA 19.9 LIQUIDO PLEURAL	CA199PLE	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Lab.Central	
CA 27.29 MARCADOR TUMORAL	CA27.29	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CA++ -CALCIO IÓNICO (GASOMETRÍA)	CA_ION	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
CADENAS LIGERAS KAPPA	KAPPA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
CADENAS LIGERAS LAMBDA	LAMBDA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA EN SUERO	KAPPAL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
CADENAS LIGERAS LIBRES LAMBDA EN SUERO	LAMBDAL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
CADMIO	CADMIO	Sangre EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CALCIO	CA	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
CALCIO EN 18 HORAS	OCA18	Orina de 18 horas	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
CALCIO EN 24 HORAS	OCA24	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
CALCIO EN ORINA	OCA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
CALCIO LÍQUIDO BIOLÓGICO	CABIO.U	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
CALCITONINA	CAL.TI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
CALCITONINA 2ª MUESTRA	CALCITO.2M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CALCITONINA 3ª MUESTRA	CALCITO.3M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CALCITONINA 4ª MUESTRA	CALCITO.4M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CALCIURIA EN AYUNAS EN ORINA	OCAAYU	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
CALCULO URINARIO (ESTUDIO INFRARROJOS)	CALCUL	CALCULO RENAL	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	LLERENA	
CALPROTECTINA EN HECES	CALPRO	HECES	Conten.Heces 100ml	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
CAMPESTEROL	E_CAMPES	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CÁNCER DE COLON ASOCIADO A PAFR (GEN MYH)	MCA04	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
CANCER DE MAMA/OVARIO (COMPLETO)	MCA02	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
CANCER DE MAMA/OVARIO (RECURRENTES)	MCA01	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
CANNABINOIDES	OCANN	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
CANNABIS EN SALIVA	CANNA_SAL	Saliva	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CAPACIDAD REDUCTORA DE FAGOCITOS	DHR	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
CARBAMACEPINA	CARBA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	
CARBIDOPA	CARBIDO	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CARGA VIRAL RNA - VIH	VCVIRA	Plasma EDTA	(*2 Tubos EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA
CARGA VIRAL V. HEPATITIS B	CVVHB	Plasma EDTA	(*2 Tubos EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Proteinas/marcadores	Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA
CARGA VIRAL VHC	CV.VHC	Plasma EDTA	(*2 Tubos EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Proteinas/marcadores	Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA
CARIOTIPO DE ALTA RESOLUCIÓN EN SANGRE PERIFÉRICA	CARSP.AR	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
CARIOTIPO EN BIOPSIA DE TEJIDO	CARBT	BIOPSIA	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
CARIOTIPO EN LÍQUIDO AMNIÓTICO	CARLA	LÍQUIDO AMNIÓTICO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
CARIOTIPO EN MÉDULA ÓSEA	CARMO	MÉDULA ÓSEA	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
CARIOTIPO EN RESTOS ABORTIVOS	CARRA	RESTO ABORTIVO	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
CARIOTIPO EN SANGRE DE CORDÓN	CARSC	SANGRE CORDÓN	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
CARIOTIPO EN SANGRE PERIFÉRICA	CARSP	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
CARIOTIPO EN VELLOSIDAD CORIAL	CARVC	VELLOSIDAD CORIAL	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
CARNITINA TOTAL EN PLASMA	CARNIT_T	Plasma heparina congelado	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
CARNITINA ESTERIFICADA EN PLASMA	CARNIT_ES	Plasma heparina congelado	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
CARNITINA LIBRE CO	CO	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CARNITINA LIBRE CO EN SANGRE SECA	COARN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
CARNITINA LIBRE EN PLASMA	CARNIT_L	Plasma heparina congelado	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
CARNITINA LIBRE EN PLASMA SEMINAL	LEARNI	SEMEN	Contenedor estéril boca ancha 100ml	Cód. barras blanco	CERHA	REFERENCE	Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA
CARNITINA TOTAL EN SANGRE SECA	CARN_T_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
CARNITINA TOTAL Y LIBRE EN PLASMA (PERFIL)	CARNIT_TYL	Plasma heparina congelado	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
CARNOSINA	LCARNO	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
CARNOSINA	CARNO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CARNOSINA	OCARNO	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CAROTENOS SUERO	CAROT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CATECOLAMINAS LIBRES URINARIAS	OCATE	ORINA 24H ACIDA	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
CATECOLAMINAS PLASMATICAS (PERFIL)	CAT_PLA	Plasma EDTA	(*)2 Tubos EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	REFERENCE	Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA
CATECOLAMINAS UR./CREATININA	CAT.CR	ORINA ACIDA aislada	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	HOSPITAL	Hormonas	Niños con dificultad para recoger orina de 24 h. La muestra de orina se acidificará en el lab de Hormonas
CATECOLAMINAS URINARIAS (PERFIL)	CAT_UR1	ORINA 24H ACIDA	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
CATERIZACION SENOS PETROSOS (PERFIL)	CAT_SENOS	Plasma EDTA/SUERO	EDTA ROSA/ TUBO ROJO	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
CEA	CEA	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
CEA LÍQUIDO BIOLÓGICO	CEABIO	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
CEA EN L. PLEURAL	CEAPLE	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Lab.Central	
CEA EN L.ASCÍTICO	CEAASC	ASCITICO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Central	
CEA EN LCR	CEALCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Lab.Central	
CERULOPLASMINA	CERULO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
CH100 COMPLEMENTO TOTAL	CH100	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CH-50	CH50	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
CHCM	CHCM	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG EIA	CNEUG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG IFI	NEUMG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM EIA	CNEUM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM IFI	NEUMM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
CHLAMYDIA PSITACCI IGG	SITAG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
CHLAMYDIA PSITACCI IGM	SITAM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG	TRACOG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM	TRACOM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
CICLOSPORINA	CICLO	Sangre EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	Bioq.especial	
CICLOSPORINA A LAS 2 HORAS	CICLO2	Sangre EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	Bioq.especial	Indicar el orden de muestra en el tubo
CISTATINA C	CISTAT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
CISTATIONINA	LCISTA	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
CISTATIONINA	CISTIO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CISTATIONINA	OCISTA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CISTICERCOSIS IGG	CISTI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
CISTINA	LCISTI	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
CISTINA	CISTIN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CISTINA	OCISTI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CISTINA EN ORINA AISLADA	CISTI_ORI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CISTINA EN ORINA DE 24 HORAS	CISTI_O24	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
CITOMEGALOVIRUS IGG	CMVG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
CITOMEGALOVIRUS IGG EN LCR	CMVG.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
CITOMEGALOVIRUS IGM	CMVM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
CITOQUÍMICA	CITO	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
CITRULINA	LCITRU	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
CITRULINA	CITRUL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CITRULINA	OCITRU	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CITRULINA EN SANGRE SECA	CITRUL_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
CITRULINA PLASMÁTICA	CITRU_PLAS	Plasma EDTA	(*)Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	Requiere preparación específica de la muestra con ácido perclórico . AVISAR A PREANALITICA PREVIAMENTE (48924)
CK-MB MASA	CKMMB	SUERO	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	SUERO blanca (urgencias)	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	Solicitar en volante de urgencias y extraer sangre en tubo verde de heparina de litio con gel.También SUERO AMARILLO CENTRAL
CLOBAZAM	CLOBA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CLONIDINA TEST PARA GH	T.CLONI.GH	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CLORO	CL	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
CLORO	CLCR.U	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
CLORO EN HECES	CL_HECES	HECES	Conten.Heces 100ml	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
CLORO (GASOMETRÍA)	CL_G.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
CLORO EN 18 HORAS	OCL18	Orina de 18 horas	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
CLORO EN 24 HORAS	OCL24	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
CLORO EN ORINA	OCL	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
CLORO LIBRE EN AGUA DE DIÁLISIS	CL_LIBRE	AGUA DIALISIS	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CLORO LÍQUIDO BIOLÓGICO	CLBIO.U	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
CLOZAPINA	CLOZA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
COAGULACIÓN BÁSICA RUTINA/ PREOPERATORIO (PERFIL)	CB	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
COAGULACIÓN BÁSICA URGENCIAS (PERFIL)	C	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
COBALTO	CO	Sangre heparina	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	Tubo de heparina verde sin gel
COBRE	CU	SUERO	Tubo suero Tapón AZUL oscuro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere tubo especial con silicona Trace tapón AZUL oscuro
COBRE EN AGUA DE DIÁLISIS	CU_AGUA	AGUA DIALISIS	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
COBRE EN ORINA	OCU	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
COBRE EN ORINA DE 24 HORAS	OCU24	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
COCAINA	OCOCA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
COCAÍNA EN SALIVA	COCA_SAL	Saliva	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
COCCIDIOIDES IMMITIS ANTICUERPOS	COCCI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
COCIENTE ALBUMINA GLOBULINA	A.G	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
COCIENTE CARNITINA ESTERIFICADA /LIBRE	CARNIT_EL	Plasma heparina congelado	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
COCIENTE FENILALANINA/TIROSINA EN SANGRE SECA	FA_TIR	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
COCIENTE FENILALANINA/TIROSINA EN SANGRE SECA	FA_TIR_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
COCIENTE FENILALANINA/TIROSINA ORINA SECA	OFA_OTIR	ORINA SECA	PAPEL CON ORINA seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	
COCIENTE GLICINA LCR/GLICINA SUERO	GLICICLR_S	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
COCIENTE MICROALBUMINURIA/CREATININA	MA.CREA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
CODEÍNA EN SALIVA	CODEIN_SAL	Saliva	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
COENZIMA Q10 EN PLASMA	Q10	Plasma EDTA congelado	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
COFACTOR DE RISTOCETINA	RISTOCO	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
COHB- CARBOXIHEMOGLOBINA	FCOHB.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
COLESTANOL	COLES	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
COLESTEROL	E_COLESTER	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
COLESTEROL LÍQUIDO BIOLÓGICO	COLBIO	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
COLESTEROL (ASC)	COLASC	ASCITICO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	ASCITICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
COLESTEROL L. PERITONEAL DIALISIS	COLPER	PER DIALIS	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
COLESTEROL LDL (CALCULADO)	LDL	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
COLESTEROL LIQUIDO PLEURAL	COLPLE	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
COLESTEROL TOTAL	COLE	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
COLESTEROL VLDL (CALCULADO)	VLDL	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
COMPLEMENTO C1- INHIBIDOR	C1INH	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcado res	
COMPLEMENTO C1- INHIBIDOR ACTIVIDAD	C1INH_ACT	PLASMA CITRATO CONGELADO	Tubo CITRATO Tapón AZUL	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
COMPLEMENTO C1Q	C1Q	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
COMPLEMENTO C2	C2	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
COMPLEMENTO C5	C5_COM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CONCENTRACIÓN DE RENINA PLASMÁTICA	RENINA	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	Hormonas	
CONEXINA 26	MSO01	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
CONEXINA 30 (RECURRENTES)	MSO02	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
CONFIRMATORIO ANTICUERPOS HCV POR INMUNOBLOT	HCV_WB	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	HOSPITAL	Proteína/marcadores	
CONFIRMATORIO DE TOXOPLASMOSIS IGM	TOXOM_CONF	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
CONTROL (TP)	TPC	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
CONTROL (TR)	TRC	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
CONTROL (TT)	TTC	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
CONTROL (TTPA)	TTPC	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
COOMBS DIRECTO	CD	SANGRE	EDTA 10ml BANCO Tapón violeta	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
COOMBS MONOESPECÍFICO	CM	SANGRE	EDTA 10ml BANCO Tapón violeta	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
COPROPORFIRINAS EN SANGRE TOTAL	COPROPOR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
COPROPORFIRINAS URINARIAS	COPORF	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	Orina de 24 horas protegida de la luz. La muestra de orina debe protegerse de la luz con papel aluminio. Indicar diuresis
CORTICOSTERONA	CORTICOS	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CORTISOL	CORT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
CORTISOL 10ª MUESTRA	COR.10M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 11ª MUESTRA	COR.11M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 12ª MUESTRA	COR.12M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 13ª MUESTRA	COR.13M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 14ª MUESTRA	COR.14M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 15ª MUESTRA	COR.15M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 16ª MUESTRA	COR.16M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
CORTISOL 17ª MUESTRA	COR.17M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 18ª MUESTRA	COR.18M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 19ª MUESTRA	COR.19M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 20ª MUESTRA	COR.20M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 21ª MUESTRA	COR.21M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 22ª MUESTRA	COR.22M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 23ª MUESTRA	COR.23M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 2ª MUESTRA	COR.2M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 3ª MUESTRA	COR.3M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 4ª MUESTRA	COR.4M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 5ª MUESTRA	COR.5M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 6ª MUESTRA	COR.6M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 7ª MUESTRA	COR.7M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 8ª MUESTRA	COR.8M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL 9ª MUESTRA	COR.9M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL A LAS 20 HORAS	CORTN	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	Indicar en el tubo que es la extracción de las 20 horas
CORTISOL BASAL	COR.BASAL	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL EN ORINA DE 24 HORAS	OCORT24	ORINA 24 HORAS	Tube 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	Alicuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
CORTISOL EN SALIVA NOCTURNO (23 HORAS)	CORT_SAL	Saliva	Dispositivo especial SALIVETTE	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Hormonas	Requiere dispositivo especial solicitar en PREANALITICA(48924)
CORTISOL LIBRE URINARIO	OCORT	ORINA AISLADA	Tube 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
CORTISOL SENO PETROSO DERECHO 1ª (-15MIN)	CORT_6	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
CORTISOL SENO PETROSO DERECHO 2ª (0 MIN)	CORT_7	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
CORTISOL SENO PETROSO DERECHO 3ª (+3 MIN)	CORT_8	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
CORTISOL SENO PETROSO DERECHO 4ª (+5 MIN)	CORT_9	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
CORTISOL SENO PETROSO DERECHO 5ª (+10 MIN)	CORT_10	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
CORTISOL SENO PETROSO IZQUIERDO 1ª (-15MIN)	CORT_1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
CORTISOL SENO PETROSO IZQUIERDO 2ª (0 MIN)	CORT_2	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
CORTISOL SENO PETROSO IZQUIERDO 3ª (+3 MIN)	CORT_3	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
CORTISOL SENO PETROSO IZQUIERDO 4ª (+5 MIN)	CORT_4	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
CORTISOL SENO PETROSO IZQUIERDO 5ª (+10 MIN)	CORT_5	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
CORTISOL TRAS DEXAMETASONA	CORDXM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL TRAS METOPIRONA	COR.METOPI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CORTISOL VENA PERIFÉRICA 1ª (-15MIN)	CORT_11	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
CORTISOL VENA PERIFÉRICA 2ª(0 MIN)	CORT_12	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
CORTISOL VENA PERIFÉRICA 3ª (+3 MIN)	CORT_13	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
CORTISOL VENA PERIFÉRICA 4ª (+5 MIN)	CORT_14	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
CORTISOL VENA PERIFÉRICA 5ª (+10 MIN)	CORT_15	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados.
CORTISOL.24ª MUESTRA	COR.24M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
COTININA EN ORINA	OCOT	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
COTININA SERICA	COT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
COXIELLA BURNETTI IGG FASE 1 IFI	COXG1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
COXIELLA BURNETTI IGG FASE 2 EIA	COXG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
COXIELLA BURNETTI IGG FASE 2 IFI	COXGIFI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
COXIELLA BURNETTI IGM FASE 1 IFI	COXM1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
COXIELLA BURNETTI IGM FASE 2 EIA	COXM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
COXIELLA BURNETTI IGM FASE 2 IFI	COXMIFI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
CPK	CPK	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
CREATININA	CRE	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
CREATININA PERITONEAL DIALISIS	PCREA.U	PER DIALIS	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
CREATININA 2ª MICCIÓN	OCRE2M	Orina 2ª micción	Tubo 10 ml orina	DESOXIPIRIDINOLI NA naranja	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Muestra de orina de segunda micción de la mañana
CREATININA EN 18 HORAS	OCRE18	Orina de 18 horas	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
CREATININA EN 24 HORAS	OCRE24	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
CREATININA EN AYUNAS EN ORINA	OCREAY	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
CREATININA EN ORINA	OCRE	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
CREATININA LÍQUIDO BIOLÓGICO	CREBIO.U	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
CREATININA LIQUIDO PLEURAL	CREPLE.U	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
CRIOAGLUTININAS	CRIOAGLUTI	SUERO	Tubo caliente 37º	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Tubo caliente especial hasta coagulación completa
CRIOGLOBULINA	CRIOG	SUERO	Tubo caliente 37º	Número pequeño	HOSPITAL	Proteina/marcadores	Tubo caliente especial hasta coagulación completa
CRISTALES (SINOV)	CRISTA.U	SINOVIAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
CROMOGRANINA	CROMOG	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CTX (TELOPÉPTIDO CARBOXITERMINAL COLÁGENO I)	CTX	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
CUANTIFICACIÓN BCR-ABL p190 Y p210	MH102	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
CUANTIFICACIÓN t(15;17): PML-RARA	MH104	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
CUANTIFICACIÓN t(8;21):AML1-ETO	MH101	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
CUERPOS CETONICOS TIRA DE ORINA	CCETO	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
CUERPOS REDUCTORES	REDUCT	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
CULTIVO BACTERIOLÓGICO	OBACT	ORINA	Tubo 4 ml azida tapón amarillo urocultivo	UROCULTIVO	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	Requiere tubo de ORINA de 4 ml con conservante de AZIDA en polvo.
CURVA DE INSULINA	SOG.INSULI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
CYFRA 21.1	CYF21	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
D-ALLO HIDROLISINA	LDLISI	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
D-ALLO HIDROLISINA	D_LISI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
D-ALLO HIDROLISINA	ODLISI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
DECADIENOIL CARNITINA C10:2	C10_2	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
DECADIENOIL CARNITINA C10:2 EN SANGRE SECA	C102CARN_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
DECANOIL CARNITINA C10	C10	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
DECANOIL CARNITINA C10 EN SANGRE SECA	C10CARN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
DECENOIL CARNITINA C10:1	C10_1	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
DECENOIL CARNITINA C10:1 EN SANGRE SECA	C101CARN_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
DEHIDROEPIANROSTERONA	DHEA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
DELECCIONES DUPLICACIONES EN HNPCC	MCA05	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
DENSIDAD TIRA DE ORINA	DENSI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
DESOXIPIRIDINOLINA	DPIRID	Orina 2ª micción	Tubo 10 ml orina	DESOXIPIRIDINOLI NA naranja	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	Muestra de orina de segunda micción de la mañana
DESOXIPIRIDINOLINA/CREATININA	DP.CRE	Orina 2ª micción	Tubo 10 ml orina	DESOXIPIRIDINOLI NA naranja	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	Muestra de orina de segunda micción de la mañana
DESPISTAJE DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS DE ESCLEROSIS	ESCLERO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
DESPISTAJE DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS DE MIOSITIS	MIOSIT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
DETECCIÓN GEN SRY DEL CROMOSOMA Y	FSV09	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
DETECCIÓN REGIONES SUBTELOMÉRICAS	FSV10	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
DETECCIÓN TEMPRANA ANEUPLOIDIAS EN RESTOS ABORTIVOS	MSV02	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
DETECCIÓN TEMPRANA DE ANEUPLOIDÍAS	MSV01	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
DG. GENETICO DE FIBROSIS QUÍSTICA	FQ	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
DHEA 2ª MUESTRA	DHEA_2M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	HOSPITAL	REFERENCE	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
DHEA 3ª MUESTRA	DHEA_3M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	HOSPITAL	REFERENCE	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
DHEA 4ª MUESTRA	DHEA_4M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	HOSPITAL	REFERENCE	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
DHEA BASAL	DHEA_B	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	HOSPITAL	REFERENCE	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
DHEA SULFATO	DHEAS	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
DHEA SULFATO 2ª MUESTRA	DHEAS_2M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
DHEA SULFATO 3ª MUESTRA	DHEAS_3M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
DHEA SULFATO 4ª MUESTRA	DHEAS_4M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
DHEA SULFATO 5ª MUESTRA	DHEAS_5M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
DHEA SULFATO BASAL	DHEAS_BAS	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
DIAZEPAM/NORDIAZEPAM (VALIUM)	DIAZE	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
DICLORAMINA EN AGUA DIÁLISIS	DICLORA	AGUA DIALISIS	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
DIFTERIA IGG	DIFTEG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
DIGOXINA	DIGO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	
DÍMERO D	DIME	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
DISIALOTRANSFERRINA	DISIALO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
DIURÉTICOS EN ORINA	DIURETICOS	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
DODECENOIL CARNITINA C12:1	C12_1	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
DODECENOIL CARNITINA C12:1 EN SANGRE SECA	C121CARN_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
DOPAMINA PLASMÁTICA	DOPAMI	Plasma EDTA congelado	(*)2 Tubos EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	REFERENCE	Se requieren 2 tubos de EDTA ROSA
DOPAMINA UR. /CREATININA	DOP.CR	ORINA ACIDA aislada	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	HOSPITAL	Hormonas	Niños con dificultad para recoger orina de 24 h. La muestra de orina se acidificará en el lab de Hormonas

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
DOPAMINA URINARIA	ODOPAM	ORINA 24H ACIDA	Tube 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
DROGAS EN ORINA (PERFIL)	TRIAGE	ORINA AISLADA	Tube 10 ml orina	ORINA anaranjado	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
DRVVT CONFIRM	LACC	SANGRE	Tube CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
DRVVT SCREEN	LACS	SANGRE	(*)3Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
E. ANTIC. IRREGULAR/C. INDIRECTO	CI	SANGRE	EDTA 10ml BANCO Tapón violeta	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
ECA	ECA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
ECA EN LIQUIDO PLEURAL	ECAPLE	PLEURAL	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Bioq.especial	
ECA EN LCR	ECALCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Bioq.especial	
ECHOVIRUS EN LCR	ECHO.LCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
ECHOVIRUS FC	ECHO	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
EHRlichia CHAFFEENSIS IGG	EHLIG	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
EHRlichia CHAFFEENSIS IGM	EHLIM	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
ELASTASA PANCREATICA EN HECES	ELAS	HECES	Conten.Heces 100ml	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ELECTROFORESIS HEMOGLOBINAS (PERFIL)	HEMOGPT	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tube EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel
ENFERMEDAD DE VON HIPPEL LINDAU (GEN VHL)	MCA10	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tube EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ENTAMOEBA HYSTOLÍTICA	ENTAMO	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
ENZIMAS ERITROCITARIAS	CUAN	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
EOSINÓFILOS	EOS%	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
EOSINÓFILOS (VALOR ABS.)	EOS#	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ERITROCITOS TIRA DE ORINA	ERIT	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
ERITROPOYETINA	ERITRO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
ERITROPOYETINA LÍQUIDO BIOLÓGICO	EPO_LBIO	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Hormonas	
ESPERMATOZOIDES ORINA POST-ORG	ESPOST	ORINA AISLADA	Contenedor esteril boca ancha 100ml	Cód. barras blanco	CERHA	Andrología	Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA
ESTEROLES EN SUERO (PERFIL)	ESTEROLES	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico del paciente
ESTRADIOL	ESTRAD	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
ESTRADIOL (CERHA)	E2.U	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	
ESTRADIOL 2ª MUESTRA	ESTRAD.2M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ESTRADIOL 3ª MUESTRA	ESTRAD.3M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ESTRADIOL 4ª MUESTRA	ESTRAD.4M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ESTRADIOL 5ª MUESTRA	ESTRAD.5M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ESTRADIOL 6ª MUESTRA	ESTRAD.6M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ESTRADIOL 7ª MUESTRA	ESTRAD.7M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
ESTRIOL TOTAL EN SUERO	ESTRI_SUE	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ESTRONA	ESTRON	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ESTUDIO DE COAGULACIÓN BÁSICO	EBC	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
ESTUDIO DE GRASA EN HECES (PERFIL)	VANDEKAMER	HECES DE 24 HORAS	Cont.heces 24 H	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Contenedor para heces de boca ancha
ESTUDIO DE MUTACIONES RECURRENTE ASOCIADAS A APC	MCA11	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ESTUDIO DSA	EST.DSA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ESTUDIO GENÉTICO ANTITROMBINA CAMBRIDGE II	MH205	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ESTUDIO GENETICO DE HEMOFILIA	MH208	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ESTUDIO GENÉTICO FACTOR XII DE LA COAGULACIÓN (C46T)	MH206	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ESTUDIO MOLECULAR DE LA PROTEINA TAU	PROT_TAU	SANGRE TOTAL (EDTA)	(*)2 Tubos EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	REFERENCE	Requiere 2 tubos de EDTA ROSA, historial clínico y antecedentes familiares
ESTUDIO MOLECULAR DE SÍNDROME FRÁGIL X	MSV06	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ESTUDIO MOLECULAR DEL CROMOSOMA Y	MSV12	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ESTUDIO MOLECULAR HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA	MOL_HSC	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ETANOL EN SANGRE TOTAL (Control clínico)	ETANOL	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Si la alcoholemia es de una orden judicial , buscar la prueba ALCOHOL del catálogo
ETANOLAMINA	LEAMIN	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
ETANOLAMINA	E_AMIN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ETANOLAMINA	OEAMIN	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ETILENGLICOL	ETILENGLI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ETOSUXIMIDA	ETOSUX	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
EVEROLIMUS	EVE	Sangre EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	Bioq.especial	
EXPRESIÓN INTRACITOPLASMÁTICA DE ZAP70 EN LLC-B	ZAP70	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
EXTASIS	OEXTA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
FACTOR C3 NEFRITICO	C3_NEFRITI	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FACTOR DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF-A)	VEGF	Plasma EDTA congelado	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	
FACTOR H COMPLEMENTO SUERO	FACTOR_H	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FACTOR I COMPLEMENTO SUERO	FACTOR_I	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FACTOR II	FII	SANGRE	(*)3Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
FACTOR II DE COAGULACIÓN	MH201	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
FACTOR IX	FIX	SANGRE	(*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
FACTOR REUMATOIDE	FR	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
FACTOR REUMATOIDE	FRSIN	SINOVIAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	SINOVIAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
FACTOR REUMATOIDE LIQUIDO PLEURAL	FRPLE	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
FACTOR V	FV	SANGRE	(*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
FACTOR V LEIDEN	MH202	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
FACTOR VII	FVII	SANGRE	(*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
FACTOR VIII	FVIII	SANGRE	(*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
FACTOR VIII CROMOGENICO	FVIII.CR	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
FACTOR VON WILLEBRAND ANTIGENICO	VWAG	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
FACTOR X	FX	SANGRE	(*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
FACTOR XI	FXI	SANGRE	(*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
FACTOR XII	FXII	SANGRE	(*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
FACTOR XIII ANTIGENICO	FXIII	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
FENCICLIDINA	OPCP	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
FENIALANINA 1 HORA TRAS BH4 EN SANGRE SECA	FASECA_1H	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción
FENIALANINA 12 HORAS TRAS BH4 EN SANGRE SECA	FASECA_12H	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción
FENIALANINA 16 HORAS TRAS BH4 EN SANGRE SECA	FASECA_16H	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción
FENIALANINA 2 HORAS TRAS BH4 EN SANGRE SECA	FASECA_2H	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
FENILANINA 24 HORAS TRAS BH4 EN SANGRE SECA	FASECA_24H	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción
FENILANINA 3 HORAS TRAS BH4 EN SANGRE SECA	FASECA_3H	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción
FENILANINA 4 HORAS TRAS BH4 EN SANGRE SECA	FASECA_4H	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción
FENILANINA 6 HORAS TRAS BH4 EN SANGRE SECA	FASECA_6H	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción
FENILANINA 8 HORAS TRAS BH4 EN SANGRE SECA	FASECA_8H	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción
FENILANINA	LFALAN	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
FENILANINA	FENILA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FENILANINA	OFALAN	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FENILANINA MG/DL EN SANGRE SECA	FA_C_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
FENILANINA (MG/DL) EN SANGRE SECA	FA_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
FENILANINA / TIROSINA EN SANGRE SECA	FATIR_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
FENILANINA BASAL EN SANGRE SECA	FASECA_BAS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción
FENILANINA EN SANGRE SECA	FENIL_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
FENILANINA EN SANGRE SECA (PERFIL)	PKU	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
FENILANINA ORINA SECA	FENIL_OS	ORINA SECA	PAPEL CON ORINA seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	
FENILANINA TRAS BH4 EN SANGRE SECA (PERFIL)	BH4	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción
FENITOINA	FENI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	
FENOBARBITAL	FENO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	
FENOTIPAJE LINFOCITOS B MEMORIA	LINFOBMEMO	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
FENOTIPAJE LINFOCITOS T MEMORIA	LINFOTMEMO	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
FENOTIPO ALFA 1 ANTITRIPSINA	FNA1AT	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FERRITINA	FERRI	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
FIBRINÓGENO (ANTIGÉNICO)	FIBA	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
FIBRINOGENO (DERIVADO)	FIBD	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
FIBRINÓGENO KLAUSS	FIBC	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO (MDRD-4)	MDRD	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
FIO2	FIO2.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
FISH PARA DETECCIÓN DE ANEUPLOIDIAS	FSHPRE	LÍQUIDO AMNIÓTICO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
FOSFATASA ACIDA TARTRATO RESISTENTE	FACTAR	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FOSFATASA ACIDA TOTAL	FACTOT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FOSFATASA ALCALINA	FALC	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
FOSFATASA ALCALINA OSEA	FAOSEA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FOSFATASA ALCALINA PLACENTARIA EN LCR	PLAP_LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
FOSFOETANOLAMINA	LFAMIN	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
FOSFOETANOLAMINA	FOETAM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FOSFOETANOLAMINA	OFAMIN	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FOSFOLIPIDOS	FOSFOLI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FOSFORO	P	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
FÓSFORO AGUA DIALISIS	P_AGUA	AGUA DIALISIS	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
FOSFORO EN 18 HORAS	OP18	Orina de 18 horas	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
FOSFORO EN 24 HORAS	OP24	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
FOSFORO EN ORINA	OP	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
FOSFOSERINA	LFSER	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
FOSFOSERINA	FOSFOS	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FOSFOSERINA	OFSER	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FRACCIÓN P2 DE LA AMILASA (PANCREÁTICA)	P2_ISOAMIL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FRACCIÓN S2 DE LA AMILASA (SALIVAR)	S2_ISOAMIL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FRACCIÓN S3 + S4 DE LA AMILASA	S3S4_ISOAM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FRAGMENTACIÓN DNA ESPERMÁTICO	ESPER_FRAG	SEMEN	Contenedor esteril boca ancha 100ml	Cód. barras blanco	HPS	REFERENCE	Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA
FRANCISELLA TULARENSIS	TULA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
FROTIS DE SANGRE PERIFERICA	FROT	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
FRUCTOSA EN ORINA	LEOFRU	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
FRUCTOSA EN PLASMA SEMINAL	LEFRU	SEMEN	Contenedor esteril boca ancha 100ml	Cód. barras blanco	CERHA	REFERENCE	Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA
FRUCTOSAMINA	FRUMM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
FSH	FSH	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
FSH 2ª MUESTRA	FSH.2M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
FSH 3ª MUESTRA	FSH.3M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
FSH 4ª MUESTRA	FSH.4M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
FSH 5ª MUESTRA	FSH.5M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
FTA-ABS IGG EN SUERO	FTAG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
FTA-ABS IGM EN SUERO	FTAM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
GABAPENTINA	GABA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
GALACTOMANANO	ASPER	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
GALACTOSA EN SANGRE SECA	GALACT	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
GALACTOSURIA	OGALAC	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
GAMMA-GT	GGT	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
GANGLIOSIDOS EN ORINA	GANGLIOSI	ORINA AISLADA	(*) 2 Tubos 10 ml ORINA	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	IBC(EXCLUSIVO PEDIATRIA)	Requiere autorización e informe clínico
GASOMETRIA (PERFIL)	GAS_HPS	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
GASOMETRIA Y COOXIMETRÍA (PERFIL)	GAS_HIC	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
GASTRINA	GASTR	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
GEN DEL PARAGANGLIOMA FAMILIAR (SDHD)	MCA06	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
GENOTIPO VHB -RESISTENCIA A LAMIVUDINA-	RESI_LAMIV	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
GENOTIPO ALFA 1 ANTITRIPSINA	GNA1AT	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico y antecedentes familiares.
GENOTIPO VIRUS HEPATITIS B	GVHB	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
GENOTIPO VIRUS HEPATITIS C	GVHC	Plasma EDTA	(*)2 Tubos EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Proteina/marcadores	Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA
GENTAMICINA	GENTA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
GH	GH	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
GH 10ª MUESTRA	GH.10M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 11ª MUESTRA	GH.11M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
GH 12ª MUESTRA	GH.12M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 13ª MUESTRA	GH.13M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 14ª MUESTRA	GH.14M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 15ª MUESTRA	GH.15M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 16ª MUESTRA	GH.16M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 17ª MUESTRA	GH.17M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 18ª MUESTRA	GH.18M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 19ª MUESTRA	GH.19M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 20ª MUESTRA	GH.20M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 21ª MUESTRA	GH.21M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 22ª MUESTRA	GH.22M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 23ª MUESTRA	GH.23M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 24ª MUESTRA	GH.24M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 25ª MUESTRA	GH.25M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 26ª MUESTRA	GH.26M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 27ª MUESTRA	GH.27M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 28ª MUESTRA	GH.28M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 29ª MUESTRA	GH.29M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 2ª MUESTRA	GH.2M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 30ª MUESTRA	GH.30M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 31ª MUESTRA	GH.31M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
GH 32ª MUESTRA	GH.32M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 33ª MUESTRA	GH.33M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 34ª MUESTRA	GH.34M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 35ª MUESTRA	GH.35M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 36ª MUESTRA	GH.36M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 37ª MUESTRA	GH.37M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 38ª MUESTRA	GH.38M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 39ª MUESTRA	GH.39M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 3ª MUESTRA	GH.3M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 40ª MUESTRA	GH.40M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 41ª MUESTRA	GH.41M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 42ª MUESTRA	GH.42M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 43ª MUESTRA	GH.43M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 44ª MUESTRA	GH.44M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 45ª MUESTRA	GH.45M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 46ª MUESTRA	GH.46M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 47ª MUESTRA	GH.47M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 48ª MUESTRA	GH.48M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 4ª MUESTRA	GH.4M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 5ª MUESTRA	GH.5M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 6ª MUESTRA	GH.6M	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
GH 7ª MUESTRA	GH.7M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 8ª MUESTRA	GH.8M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GH 9ª MUESTRA	GH.9M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GHRH	GHRH	Plasma EDTA	(*)EDTA tubo especial APROTININA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	Requiere tubo especial de EDTA con APROTININA. Pedir en PREANALITICA 48924
GLICINA	LGLICI	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
GLICINA	GLICIN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
GLICINA	OGlici	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
GLICINA EN SANGRE SECA	GLYC_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
GLICOSAMINOGLICANOS (IBC)	GAG	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	IBC (EXCLUSIVO PEDIATRIA)	Requiere autorización e informe clínico
GLICOSAMINOGLICANOS EN ORINA	GAG_REF	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
GLOBULINA TRANSPORTADORA	SHBG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
GLUCAGON	GLUCAG	Plasma EDTA congelado	(*)EDTA tubo especial APROTININA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	Requiere tubo especial de EDTA con APROTININA. Pedir en PREANALITICA 48924
GLUCAGON TEST PARA GLUCOSA	T.GLUC.GLU	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GLUCAGON TEST PARA CORTISOL	T.GLUC.COR	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GLUCOSA	GLU	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
GLUCOSA CURVA DE 75G	GLU75	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Central	Las pruebas de SOG (curvas glucosa) requieren CITA PREVIA en el 46191. Extracción en el hospital Perpetuo Socorro
GLUCOSA ORINA DE 18 HORAS	OGLU18	Orina de 18 horas	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
GLUCOSA PERITONEAL DIALISIS	PGLU.U	PER DIALIS	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
GLUCOSA (ASC)	GLUASC.U	ASCITICO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	ASCITICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
GLUCOSA (LCR)	GLULCR.U	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
GLUCOSA (SINOV)	GLUSIN.U	SINOVIAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	SINOVIAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
GLUCOSA 10ª MUESTRA	GLU10M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Central	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GLUCOSA 2ª MUESTRA	GLU2M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Central	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GLUCOSA 3ª MUESTRA	GLU3M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Central	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GLUCOSA 4ª MUESTRA	GLU4M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Central	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GLUCOSA 5ª MUESTRA	GLU5M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Central	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA ERITROCITARIA	G6PDHE	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
GLUCOSA 6ª MUESTRA	GLU6M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Central	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GLUCOSA 7ª MUESTRA	GLU7M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Central	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GLUCOSA 8ª MUESTRA	GLU8M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Central	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GLUCOSA 9ª MUESTRA	GLU9M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Central	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GLUCOSA BASAL PARA TEST FUNCIONAL	GLU.BASAL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Central	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GLUCOSA CURVA GESTACIONAL 100G	GLU100	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Central	Las pruebas de SOG (curvas glucosa) requieren CITA PREVIA en el 46191. Extracción en el hospital Perpetuo Socorro
GLUCOSA EN ORINA TIRA DE ORINA	GLUCO	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
GLUCOSA EN ORINA TIRA DE ORINA	OGLU	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
GLUCOSA LÍQUIDO BIOLÓGICO	GLUBIO.U	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
GLUCOSA LIQUIDO PLEURAL	GLUPLE.U	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
GLUCOSA ORINA DE 24 HORAS	OGLU24	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alicuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
GLUTAMINA	LGLUTA	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
GLUTAMINA	GLUTAM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
GLUTAMINA	OGLUTA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
GLUTAMINA EN SANGRE SECA	GLUTA_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
GLUTARIL CARNITINA C5DC	C5DC	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
GLUTARIL CARNITINA C5DC EN SANGRE SECA	C5DCCARN_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
GOT/AST	AST	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
GPT/ALT	ALT	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
GRAM PERITONEAL DIALISIS	GRAMPER.U	PER DIALIS	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PERITONEAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
GRASAS EN HECES	GRAS	HECES DE 24 HORAS	Cont.heces 24 H	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Contenedor para heces de boca ancha
GRASAS EN HECES DE 24 HORAS	GRAS24	HECES DE 24 HORAS	Cont.heces 24 H	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Contenedor para heces de boca ancha
GRH TST PARA GH	T.GRH.GH	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
GRUPO ABO	GRUPO	SANGRE	EDTA 10ml BANCO Tapón violeta	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
GRUPO y RH	GRH	SANGRE	EDTA 10ml BANCO Tapón violeta	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
GUANIDINOACETATO Y CREATINA EN ORINA (IBC)	GUANIDIN	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	IBC(EXCLUSIVO PEDIATRIA)	Requiere autorización e informe clínico
HAEMOPHILUS INFLUENZAE IGG	HAEMO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
HAPTOGLOBINA	HAPTO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcado res	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
HBA1	HBA1	SANGRE	Tubo EDTA Tapón ROSA	HbGLICOSILADA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
HBA2	HBA2	SANGRE	Tubo EDTA Tapón ROSA	HbGLICOSILADA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
HCM	HCM	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
HCO3- BICARBONATO	HCO3.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
HCT- HEMATOCRITO	HTC.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
HDL COLESTEROL	HDL	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
HE4 (MARCADOR TUMORAL EN SUERO)	HE4	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
HELICOBACTER PYLORI IGG	HELICG	NO DISPONIBLE	(*)NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	SOLO DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES.
HEMATÍES	HEM	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
HEMATÍES PERITONEAL DIALISIS	HEMPER.U	PER DIALIS	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
HEMATIES (ASC)	HEMASC.U	ASCITICO	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
HEMATIES (LCR)	HEMLCR.U	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
HEMATIES (SINOV)	HEMSIN.U	SINOVIAL	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
HEMATIES LÍQUIDO BIOLÓGICO	HEMBIO.U	L.Biológico	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
HEMATIES LIQUIDO PLEURAL	HEMPLE.U	PLEURAL	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
HEMATOCRITO	HCT	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
HEMATOCRITO CAPILAR	HTOC	SANGRE	TUBO CAPILAR	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
HEMOBLOBINA E + HEMOGLOBINA A2 %	MHBEA2%	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel
HEMOBLOBINA A %	MHBA%	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel
HEMOBLOBINA C %	MHBC%	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
HEMOBLOBINA D %	MHBD%	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel
HEMOBLOBINA F %	MHBF%	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel
HEMOBLOBINA S %	MHBS%	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel
HEMOBLOBINA U %	MHBU%	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel
HEMOCROMATOSIS (C282Y, H63D)	MH204	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HEMOGLOBINA	HGB	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
HEMOGLOBINA A2	HBA2.H	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
HEMOGLOBINA F	HBF.H	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
HEMOGLOBINA FETAL	HBF	SANGRE	Tubo EDTA Tapón ROSA	HbGLICOSILADA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
HEMOGLOBINA GLICOSILADA	HBA1C	SANGRE	Tubo EDTA Tapón ROSA	HbGLICOSILADA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
HEMOGLOBINA GLICOSILADA (PERFIL)	HGBGLI	SANGRE	Tubo EDTA Tapón ROSA	HbGLICOSILADA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
HEMOGRAMA (PERFIL)	H	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
HEMORRAGIA OCULTA EN HECES	HEOC	HECES	DISPOSITIVO HEOC	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	Dispositivo de recogida especial. (SCREENING UNA SOLA MUESTRA)
HEMOSIDERINA EN ORINA	HEMOSI	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
HEP (XA)	HEP	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
HEPATITIS A DIAGNÓSTICO	DIAG_HEPA	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
HEPATITIS A INMUNIDAD	INM_HEPA	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
HEPATITIS B CARGA VIRAL (PCR TIEMPO REAL) EN LAVADO SEMINAL	HBV_SEMEN	Lavado seminal	Contenedor esteril boca ancha 100ml	Cód. barras blanco	CERHA	REFERENCE	Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA
HEPATITIS B DIAGNÓSTICO	DIAG_HEPB	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
HEPATITIS B POSTVACUNAL	POST_VACHB	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
HEPATITIS B PREVACUNAL	HEPAB	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
HEPCIDINA EN SUERO	HEPCI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
HEXANOIL CARNITINA C6	C6CAR	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
HEXANOIL CARNITINA C6 EN SANGRE SECA	C6CARN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
HEXANOILGLICINA	A_HGLICI	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
HEXOXAMINIDASA BETA TOTAL Y DISTRIBUCIÓN ISOENZIMÁTICA	HEXOSAMIN	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
HIDATIDOSIS-IHA	HIDA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
HIDROLASA LISOSOMAL EN SUERO	HIDROLASA	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
HIDROXIPROLINA	LHIPRO	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
HIDROXIPROLINA	HDPROL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
HIDROXIPROLINA	OHIPRO	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
HIERRO	FE	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
HISTAMINA EN ORINA	OHISTA	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
HISTAMINA EN PLASMA EDTA	HISTA_PLAS	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	Evitar muestra de suero. Evitar plasmas hemolizados.
HISTIDINA	LHISTI	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
HISTIDINA	HIST	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
HISTIDINA	OHISTI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
HISTIDINA EN SANGRE SECA	HISTID_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
HISTOPLASMA CAPSULATUM	HISTOP	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
HISTOPLASMA CAPSULATUM EN LCR	HISTOP.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
HIV RNA VIRAL EN LAVADO SEMINAL	HIV_SEMEN	Lavado seminal	Contenedor esteril boca ancha 100ml	Cód. barras blanco	CERHA	REFERENCE	Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA
HLA EN DIABETES	HLA.DI	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA FAMILIARES PARA TMO	TMO.FAMIL	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA PACIENTES NEFROLOGÍA	HLA.NEFRO	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA PACIENTES PARA TMO	TMO.PACIEN	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-A*	A.P	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-A* EN ALTA RESOLUCIÓN	A.P.AR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-B*	B.P	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-B* EN ALTA RESOLUCIÓN	B.P.AR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-B*5701 AISLADOS	HLA_B5701	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-B27 AISLADOS	HLA_B27	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-B51	HLA_B51	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-CELIAQUÍA	HLA.CE	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-CW*	CW.P	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-CW* EN ALTA RESOLUCIÓN	CW.P.AR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-DPA1 EN ALTA RESOLUCIÓN	DPA1.P.AR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-DPB1 EN ALTA RESOLUCIÓN	DPB1.P.AR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-DQA1 EN ALTA RESOLUCIÓN	DQA1.P.AR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-DQB1 EN ALTA RESOLUCIÓN	DQB1.P.AR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
HLA-DQB1*	DQB1.P	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-DRB1 EN ALTA RESOLUCIÓN	DRB1.P.AR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-DRB1*	DRB1.P	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-DRB3 EN ALTA RESOLUCIÓN	DRB3.P.AR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-DRB3*	DRB3.P	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-DRB4 EN ALTA RESOLUCIÓN	DRB4.P.AR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-DRB4*	DRB4.P	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-DRB5 EN ALTA RESOLUCIÓN	DRB5.P.AR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-DRB5*	DRB5.P	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HLA-NARCOLEPSIA	HLA.NARCO	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
HOMOCISTEINA	HOMO	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	Proteína/marcadores	
HOMOCISTEINA TRAS SOBRECARGA DE METIONINA	HOMOTS	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	Proteína/marcadores	
HOMOCISTINA	LHOMO	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
HOMOCISTINA	HOMOC	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
HOMOCISTINA EN ORINA	OHOMO	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
HORMONA ANTIDIURETICA (VASOPRESINA)	ADH	Plasma EDTA congelado	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
HORMONA ANTIDIURETICA (VASOPRESINA)	VASOP	Plasma EDTA congelado	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	Paciente en posición supina y relajado 60 minutos antes de la extracción.Separar plasma y congelar inmediato
HORMONA ANTIMULLERIANA	ANTIMULLE	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	También tubo de SUERO ROJO. Separar inmediatamente del coágulo
HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (CERHA)	FSH.U	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
HORMONA LUTEINIZANTE (CERHA)	LH.U	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	
IG A	IGA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
IG A EN ORINA	OIGA	ORINA AISLADA	Tube 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
IG A LCR	IGALCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Proteina/marcadores	
IG E A RECOMBINANTE A NBOS D6 ALBÚMINA SÉRICA DE VACA (E204)	N_BOSD6	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E A RECOMBINANTE DE LACTOFERRINA F334 (NBOS D)	N_BOSD	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E A RECOMBINANTE NCAN F3 ALBÚMINA SÉRICA DE PERRO (E221)	N_CANF3	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E A RECOMBINANTE NDER P2 ÁCARO D. PTERONYSSINUS (D203)	N_DERP2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E A RECOMBINANTE NFEL D2 ALBÚMINA SÉRICA DE GATO (E220)	N_FELD2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E A RECOMBINANTE NSUS S ALBÚMINA SÉRICA DE CERDO (E222)	N_SUSS	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E A RECOMBINANTE RPOL D 1 POLISTES	R_POLD1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECIFICA A ANACARDO	F202	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A ABETO DE DOUGLAS	T207	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECIFICA A ACARUS SIRO	D70	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A AGUACATE	F96	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A AJO	F47	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A ALMEJA	F207	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A ALMENDRA	F20	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A ALTERNARIA ALTERNATA	M6	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A ALTRAMUZ	F335	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IG E ESPECIFICA A AMOXICILINA	C6	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A AMPICILINA	C5	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A ANHIDRIDO FTALICO	K79	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A ANHIDRIDO TRIMELITICO	K86	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A ANISAKIS	P4	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A APIO	F85	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECIFICA A APIS MELLIFERA-VENENO DE ABEJA	I1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A ARIZONICA	T222	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A ARROZ	F9	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A ARTEMISIA VULGARIS	W6	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A ASCARIS	P1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A ASPERGILLUS FUMIGATUS	M3	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A ATÚN	F40	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A AVELLANA	F17	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A AVENA	F7	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A AVENA SATIVA	G14	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A BACALAO	F3	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A BERENJENA	F262	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A BLATTA ORIENTALIS I207	I207	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A BRECOL	F260	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A CABALLA	F206	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IG E ESPECÍFICA A CACAHUETE	F13	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A CACAO	F93	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A CALAMAR	F258	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A CANDIDA ALBICANS	M5	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A CANGREJO DE MAR	F23	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A CARNE DE CERDO	F26	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A CARNE DE CONEJO	F213	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A CARNE DE POLLO	F83	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A CARNE DE TERNERA	F27	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A CASPA DE CABALLO	E3	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A CASPA DE PERRO	E5	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A CASTAÑA	F299	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A CEBADA	F6	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A CEBOLLA	F48	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A CEFACLOR	C7	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A CEFALOSPORINAS	QO2	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A CENTENO	F5	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A CEREZA	F242	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A CHAMPIÑÓN	F212	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECIFICA A CHENOPODIUM ALBUM	W10	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A CIPRÉS JAPONÉS	T24	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IG E ESPECÍFICA A CIRUELA	F255	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A CLADOSPORIUM HERBARUM	M2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A CLADOSPORIUM HERBARUM	MO2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A CLARA DE HUEVO	F1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A CLORURO DE PLATA	X19	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A COCO	F36	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A COLIFLOR	F291	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A CUCARACHA	I6	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A CYNODON DACTYLON	G2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A DACTILIS GLOMERATA	G3	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A DERMATOFAGOIDES FARINAE	D2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A DERMATOFAGOIDES PTERONYSSINUS	D1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A DOLICHOVESPULA MACULATA	I2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A ECHINOCOCCUS	P2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A EMPERADOR O PEZ ESPADA	F312	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A ENCINA	T77	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A EPITELIO DE CONEJO	E82	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A EPITELIO DE GATO	E1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A EPITELIO DE HAMSTER	E84	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A EPITELIO DE RATON	E88	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A EXCREMENTO DE PALOMA	E7	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IG E ESPECIFICA A FORMALDEHIDO	K80	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A FRESA	F44	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A GAMBA	F24	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A GARBANZO	F309	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A GELATINA	C74	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A GLUTEN	F79	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A GUISANTE	F12	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A ISOCIANATO HDI	K77	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A ISOCIANATO MDI	K76	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A ISOCIANATO TDI	K75	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A JUDIA BLANCA	F15	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A JUDIA VERDE	F315	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A KIWI	F84	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A LA RANITIDINA	Q65	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECIFICA A LACTOSA	Q49	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A LANGOSTA	F304	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A LATEX	K82	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A LECHE DE OVEJA (F 325)	F325	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A LECHE DE VACA	F2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A LENGUADO	F337	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A LENTEJA	F235	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IG E ESPECIFICA A LEPIDOGlyphUS DESTRUCTOR	D71	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A LOLIUM PERENNE	G5	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A MAIZ	F8	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A MANDARINA	F302	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A MANZANA	F49	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A MEJILLÓN	F37	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A MELOCOTÓN	F95	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A MELÓN	F87	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A MERLUZA	F307	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A MEZCLA DE ALIMENTOS	FX5	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A MEZCLA DE FRUTOS SECOS	FX1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A MEZCLA DE PESCADO.	FX2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A MOSQUITO COMUN	I71	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A MOSTAZA	F89	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECIFICA A MUCOR RACEMOSUS	M4	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A NARANJA	F33	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A NASP O 1 A-AMYLASA	K87	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A NUEZ DE BRASIL	F18	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A NUEZ DE NOGAL	F256	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A NUEZ DE NOGAL PACANERO	F201	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECIFICA A OLIVO	T9	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IG E ESPECIFICA A OLMO	T8	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A OXIDO DE ETILENO	K78	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A PARIETARIA JUDAICA	W21	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A PARIETARIA OFFICINALIS	W19	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A PENICILINA G	C1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A PENICILINA V	C2.	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A PENICILLIUM FREQUENTANS	M209	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECIFICA A PENICILLIUM NOTATUM	M1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A PEPINO (F 244)	F244	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A PERA	F94	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A PHATGMITES COMMUNIS	G7	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECIFICA A PHLEUM PRATENSE	G6	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A PIMIENTA VERDE	F263	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A PIÑA	F210	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A PIPA DE GIRASOL	K84	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A PISTACHO	F203	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A PLANTAGO LANCEOLATA	W9	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A PLÁTANO (FRUTA)	F92	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A PLATANUS ACERIFOLIA	T11	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A PLUMAS DE CANARIO	E201	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECIFICA A PLUMAS DE OCA	E70	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IG E ESPECIFICA A PLUMAS DE PALOMA	E215	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECIFICA A POA PRATENSIS	G8	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECIFICA A POLISTES SPP-VENENO DE AVISPA	I4	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A POLVO DE CASA GREER	H1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A PULPO	F59	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECIFICA A ROBLE, ENCINA	T7	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A RUMEX ACETOSELLA	W18	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A SALMÓN	F41	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A SALSOLA KALI	W11	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A SANDIA	F329	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A SARDINA	F308	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A SAUCE	T12	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECIFICA A SECALE CEREALE	G12	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A SOJA	F14	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A SUXAMETONIO	C202	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A TOMATE	F25	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A TOXOCARA	TCARA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG E ESPECÍFICA A TRIGO	F4	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A TRITICUM SATIVUM	G15	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A TROPOMIOSINA DE GAMBA	F351	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE	D72	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IG E ESPECIFICA A UVA	F259	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECIFICA A VESPUA SPP-VENENO DE AVISPA	I3	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A YEMA DE HUEVO	F75	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E ESPECÍFICA A ZANAHORIA	F31	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG E TOTAL	IGET	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG ESPECIFICA A RECOMBINANTE R MAL D1 PR-10 MANZANA F434	R_MALD1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IG G	IGG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
IG G APIS MELLIFERA-VENENO DE ABEJA	IGG_I1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG G EN ORINA	OIGG	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
IG G ESPECÍFICA A R MUX F 3	IGG_RMUXF3	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG G ESPECÍFICA A R POL D5	IGG_RPOLD5	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG G ESPECÍFICA A R VES V 5	IGG_RVESV5	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG G LCR	IGGLCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Proteina/marcadores	
IG G POLISTES SPP-VENENO DE AVISPA	IGG_I4	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG G VESPUA SPP-VENENO DE AVISPA	IGG_I3	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IG G1	IGG1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
IG G2	IGG2	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
IG G3	IGG3	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
IG G4	IGG4	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
IG M	IGM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IG M EN ORINA	OIGM	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
IG M LCR	IGMLCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Proteina/marcadores	
IGE A RECOMBINANTE RGAD C1 BACALAO (F426)	R_GADC1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE LISOZIMA (K208) N GALD D 4	K208	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE N ART V3 LPT (ARTEMISIA)	N_ARTV3	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE OVOALBUMINA N GALD D 2	F232	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE OVOMUCOIDE NGALD D 1	F233	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE R PEN A 1 TROPOMIOSINA DE GAMBA (F 351)	R_PENA1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RPRU P1 (F419) MELOCOTÓN	R_PRUP1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE A CASEINA NBOS D 8	F78	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE NBOS D 4 ALFA-LACTOALBUMINA	F76	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE NBOS D 5 BETA-LACTOGLOBULINA	F77	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RBET V1 PR-10 (ABEDUL) T215	R_BETV1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE RCAN F 1 PERRO (E101)	R_CANF1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE RCAN F 2 PERRO(E102)	R_CANF2	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A CUPRESSUS SERPENVIRENS CIPRES (T23)	T23	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A RECOMBINANTE R PLA A1 (T 241) PLATANERO	T241	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RAPI G 1.01 PR-10 (F417)	R_APIG1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE NACT D 2 KIWI	N_ACTD2	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE NANA C 2 PIÑA . MARCADOR DE CCD	N_ANAC2	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IGE A RECOMBINANTE NOLE E 1 OLEA EUROPEA (T224)	R_NOLE	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RARA H 2 CACAHUETE (F423)	R_ARAH2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RARA H 3 CACAHUETE (F424)	R_ARAH3	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RARA H 9 LTP CACAHUETE (F427)	R_ARAH9	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RARA H1 CACAHUETE (F422)	R_ARAH1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RCOR A 1 AVELLANA (F428)	R_CORA1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RCOR A 8 AVELLANA F425	R_CORA8	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RHEV B 1 LATEX (RK215)	R_HEVB1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RHEV B 11 LÁTEX (RK224)	R_HEVB11	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE RHEV B 3 LATEX (RK217)	R_HEVB3	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RHEV B 5 LATEX (RK218)	R_HEVB5	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RHEV B 6,01 LATEX (RK219)	R_HEVB6.01	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RHEV B 6,02 LATEX (RK220)	R_HEVB6.02	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RHEV B 8 LATEX (RK221)	R_HEVB8	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RHEV B 9 LÁTEX (RK222)	R_HEVB9	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE RPHL P 1 (G 205) HIERBA TIMOTEA	R_PHL1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RPHL P 5B (G 215) HIERBA TIMOTEA	R_PHL5	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RPRU P 3 (F420) LTP MELOCOTÓN	R_PRUP3	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE JUG R 1 NUÉZ	R_JUGR1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE JUG R 3 NUÉZ	R_JUGR3	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE RAPI M 1 (I208)	R_APIM1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IGE A RECOMBINANTE NACT D 1 KIWI	N_ACTD1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE RACT D 8 KIWI (PR-10 PROTEÍNA)	N_ACTD8	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE RCYP C1 CARPA (F355)	R_CYPC1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE RPRU P 4 (F 421) PROFILINA MELOCOTÓN	R_PRUP4	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RTRI A 19; OMEGA-5 GLIADINA (F416)	R_TRIA19	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE NDER P 1 D.PTERONYSSINUS (D 202)	N_DERP1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE NGAL D 3 CONALBUMINA HUEVO (F323)	N_GALD3	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RBER E1 NUEZ DE BRASIL F354	R_BERE1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE RDER P 10 D.PTERONYSSINUS (D 205)	R_DERP10	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RDER P 2 D.PTERONYSSINUS (D 203)	R_DERP2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RALT A1 ALTERNARIA ALTERNATA (M229)	R_ALTA1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RGLY M4 PR-10 SOJA	R_GLYM4	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE RGLY M5 BETA-CONGLICININA, SOJA	N_GLYM5	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE RGLY M6GLICININA, SOJA	N_GLYM6	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE ANSUS S ALBÚMINA SERICA DE CERDO	E222	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE MUXF3 CCD, BROMELAINA (O214)	R_MUXF3	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE NSALK1 (SALSOLA)	N_SALK1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE NART V1	N_ARTV1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE NCUP A 1 (CIPRÉS)	N_CUPA1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE NCYN D1 (G216) CYNODON DACTYLON	N_CYND1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE OLEE 7 LTP (OLIVO)	R_OLEE7	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IGE A RECOMBINANTE R OLE E 9 OLEA	R_NOLEE9	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE R VES V2 VESPPULA (HIALURONIDASA)	R_VESV2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE RARAH8 PR-10 CACAHUETE (F352)	R_ARAH8	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RFEL D 1 GATO (E 94)	R_FELD1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE RPAR J 2 (PARIETARIA)	R_PARJ2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RPHL P 7 (G210) HIERBA TIMOTEA	R_PHL7	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RPHL P 7 Y RPHL P 12	G214	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RPOL D 5 POLISTES (I 210)	R_POLD5	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RTRI A 14 LTP TRIGO (F433)	R_TRIA14	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE A RECOMBINANTE RVES V 5 VESPPULA (I209)	R_VESV5	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE A RECOMBINANTE RVES V1 VESPPULA (FOSFOLIPASA A1)	R_VESV1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE EPECÍFICA A TIOMERSAL Q91	Q91	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A GOMA ARÁBIGA F297	F297	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A NEOMICINA	Q28	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A TOXOIDE TETÁNICO (RC 208)	RC208	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A ALPISTE	G71	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A MALTA (F90)	F90	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A PIMENTÓN	F218	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A LEVADURA F45 (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	F45	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A PANGA	RS258	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A ABACHI (MADERA DE SAMBA)	K212	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IGE ESPECÍFICA A ACEITUNA	F342	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A ACELGA	RS242	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO	AAS.A	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A ÁCIDO CLAVULANICO	Q21	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A ALBAHACA	F269	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A ALBARICOQUE	F237	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A ALFA GAL 1,3 GAL (CETUXIMAB)	O215	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A ALFORFON	F11	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A ALGARROBA	F296	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A ALKALASA K205	K205	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A ALUBIA PINTA F 287	F287	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A ASPERGILLUS NIGER	M207	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A AZITROMICINA	X04	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A BESUGO	RS247	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A BLOMIA TROPICALIS	D201	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A BOGAVANTE	F80	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A BOQUERÓN	F313	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A CAFÉ F221	F221	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A CALABACÍN	RS246	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A CALABAZA	F225	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A CALAMAR DEL PACÍFICO	F58	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IGE ESPECÍFICA A CANGREJO DE RÍO	F320	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A CARACOL (F314)	F314	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A CARNE DE PAVO	F284	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A CASPA DE VACA	E04	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A CHUFA	RS255	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A CLORHEXIDINA	C08	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A CLORURO DE COBRE	Q80	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A CLORURO DE NIQUEL (X16)	X16	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A CODEÍNA	Q44	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A COL (REPOLLO)	F216	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A COMINO	RS238	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A CORDERO	F88	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A CROMO	X45	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A CURRY F281	F281	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A DÁTIL	F289	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE ESPECÍFICA A DICLOFENAC	Q24	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A DORADA	RS254	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A EMPERADOR O PEZ ESPADA	F412	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE ESPECÍFICA A ENELDO	F277	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A EPITELIO DE CABRA	E80	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A EPITELIO DE OVEJA	E81	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IGE ESPECÍFICA A ERITROMICINA	Q07	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A ESPARRAGO	F261	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A ESPINACA	F214	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A FLETAN / HALIBUT	F303	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A FOLCODINA C261	C261	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A GALLO (PESCADO)	F311	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A GLIADINA F98	F98	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A GLYCYPHAGUS	D73	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A HABA (RS243)	RS243	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A HIGO	F328	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A IBUPROFENO	IBUP	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A JUREL	F60	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A LA MARIPOSA DE LA HARINA	I203	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A LECHE DE CABRA	F300	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE ESPECÍFICA A LECHUGA	F215	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A LECITINA	X15	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A LIMÓN	F208	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A LITCHI (F348)	F348	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A LIVETINA (GAL D 5) ALBÚMINA SERICA POLLO	GALD5	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A LUBINA	RS244	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A LÚPULO	F324	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IGE ESPECÍFICA A MANGO	F91	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A MANZANILLA (MATRICARIA CHAMOMILLA)	W206	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A MAXATASA RK204	RK204	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A MERO	F410	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A METAMIZOL (NOLOTIL)	Q06	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A MEZCLA (COBAYA, RATA, RATÓN, HAMSTER, CONEJ)	EX70	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A MEZCLA DE FRUTA.	FX15	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A MEZCLA DE PLUMAS EX71	EX71	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A MIEL	F247	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A MIJO	F55	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A MOSCA DOMÉSTICA	RS233	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A MUCOR RACEMOSUS	MO4	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A NECTARINA (RS240)	RS240	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A NUEZ DE MACADAMIA	F345	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A NUEZ MOSCADA RF282	RF282	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A ORÉGANO (F 283)	F283	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A OSTRA	F290	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A PAPAYA (F293)	F293	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A PARACETAMOL	Q12	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A PARAGUAYO	RS257	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A PATATA	F35	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IGE ESPECÍFICA A PEREJIL (F86)	F86	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECIFICA A PERIPLANETA AMERICANA I206	I206	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A PIMIENTA BLANCA (RS249)	RS249	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A PIMIENTA NEGRA	F280	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A PIÑONES	F253	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE ESPECÍFICA A PIPA (SEMILLA) CALABAZA F226	F226	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A PLUMA DE POLLO	E85	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECIFICA A POMELO	F209	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A PUERRO	RS241	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A QUESO DURO (MANCHEGO,CHEDDAR)	F81	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECIFICA A R MAL D3 MANZANA F435	R_MALD3	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A RAPE	RS221	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A RECOMBINANTE R PLA L1 (PLANTAGO)	W234	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE N FEL D4 LIPOCALINA (E228)	R_FELD4	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE NCAN F5 ESTER.ARGIN. (E226)	R_CANF5	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A RECOMBINANTE NCOR A 9 (F440) AVELLANA	N_CORA9	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE R ASP F1 ASPERGILLUS F. (M218)	M218	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE R ASP F2 ASPERGILLUS F. (M219)	M219	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE R ASP F3 ASPERGILLUS F. (M220)	M220	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE R ASP F4 ASPERGILLUS F. (M221)	M221	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE R ASP F6 ASPERGILLUS F. (M222)	M222	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IGE ESPECÍFICA A REMOLACHA	F319	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A SARDINA JAPONESA (F 61)	F61	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A SAVINASA K206	K206	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A SCHISTOSOMA	P3	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A SEMILLA DE LINO	F333	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A SEMILLA DE SÉSAMO	F10	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE ESPECÍFICA A SEPIA	RS250	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A SUERO DE POLLO GAL D 5 ALFA LIVETINA	E219	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A TRUCHA	F204	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A VAINILLA	F234	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A VENENO DE ABEJORRO	I205	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A VENENO DE AVISPÓN (ARENARIA)	I5	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA A VENENO DE HORMIGA ROJA (SOLENOPTIS INVICTA)	I70	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
IGE ESPECÍFICA AL GUSANO DE LA HARINA	O211	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICA AL LAUREL	F278	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICO A EUROGLYPHUS MAYNEI ÁCAROS	D74	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE ESPECÍFICO A FRAMBUESA (F343)	F343	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGE RECOMBINANTE R ANA O3 ANACARDO F443	R_ANAO3	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGF II EN SUERO	IGF_2	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGF-BP3	IGFBP3	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
IGG ESPECÍFICA A ASPERGILLUS FUMIGATUS	IGG_ASPFUM	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
IGG ESPECÍFICA A ASPERGILLUS NIGER (GM207)	IGG_GM207	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGG ESPECÍFICA A EXCREMENTO DE PALOMA (E7)	IGG_E7	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGG ESPECÍFICA A PALOMA (PROTEINA, PLUMAS Y EXCREM.) GE91	IGG_GE91	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGG ESPECÍFICA A PLUMAS DE PALOMA (E215)	IGG_E215	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGG ESPECÍFICA A R VES V1 (VESPULA)	IGG_RVESV1	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGG ESPECÍFICOS A PENICILLIUM FRECUENTANS (M209)	IGG_M209	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGG4 A ALFA LACTOALBÚMINA DE LA LECHE F76	IGG4_F76	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGG4 A OVOMUCOIDE F233	IGG4_F233	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGG4 A BETA-LACTOGLOBULINA DE LA LECHE F77	IGG4_F77	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGG4 ESPECÍFICA A ASPERGILLUS FUMIGATUS	IGG4_M03	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGG4 A CASEÍNA DE LA LECHE F78	IGG4_F78	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGG4 A CLARA DE HUEVO F01	IGG4_F01	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGG4 ESPECÍFICA A APIS MELLIFERA	IGG4_I01	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGG4 ESPECÍFICA A LÁTEX	IGG4_K82	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGG4 ESPECÍFICA A POLISTES	IGG4_I04	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
IGG4 ESPECÍFICA A VESPULA	IGG4_I03	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
INDICE ANDROGENICO	IA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
ÍNDICE DE LINK O DE IGG.	LINK	LCR/SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	HOSPITAL	Proteina/marcadores	
INDICE DE TOURTELLOTTE	TOURTE	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Proteina/marcadores	
INESTABILIDAD EN CARC. DE COLON/ENDOMETRIO/ESTÓMAGO	MCA03	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tube EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
INHIBIDOR DE LA PLASMINA	AP	SANGRE	(*) 2 Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 2 tubos de CITRATO AZUL
INHIBINA B	INHIBB	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
INMUNOCOMPLEJOS CIRCULANTES	CIC	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO BAL	BAL	Lavado broncoalveolar	Frasco blanco seco estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO DE GRANULOCITOS	FENGRAN	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO DE MASTOCITOS	MASTOCITOS	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO HPN	HPN	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO LEUCEMIA AGUDA	LA	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO LIE	LIE	BIOPSIA	Tubo con medio cultivo	Cód. barras blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO LINFOCITOSIS	LINFO	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO LLA-B	LLAB	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO LLA-T	LLAT	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO LMA	LMA	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO MIELOMA	MIELOM	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO NEUTROPENIA	NEUTROPEN	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO SLP	SLP	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO SLP-B	SLPB	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO SLPNK	SLPNK	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO SLPT	SLPT	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
INMUNOFENOTIPO SMD	SMD	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
INMUNOFIJACION EN ORINA	IFORI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
INMUNOFIJACION EN SUERO	IFSUE	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteinas/marcadores	
INMUNOFIJACIÓN IGD	IF_IGD	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
INMUNOGLOBULINA A SUBCLASE IGA1	IGA1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
INMUNOGLOBULINA A SUBCLASE IGA2	IGA2	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
INMUNOGLOBULINA D	IGD	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
INR	INR	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
INR	INR.S	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
INSULINA A LOS 90 MINUTOS	INSU.90	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA 8ª MUESTRA	INSULI.8M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA A LOS 120 MINUTOS	INSU.120	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA A LOS 15 MINUTOS	INSU.15	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA A LOS 150 MINUTOS	INSU.150	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA A LOS 180 MINUTOS	INSU.180	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA A LOS 300 MINUTOS	INSU.300	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA A LOS 45 MINUTOS	INSU.45	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA A LOS 60 MINUTOS	INSU.60	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA 10ª MUESTRA	INSULI.10M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA 2ª MUESTRA	INSULI.2M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA 3ª MUESTRA	INSULI.3M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA 4ª MUESTRA	INSULI.4M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
INSULINA 5ª MUESTRA	INSULI.5M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA 6ª MUESTRA	INSULI.6M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA 7ª MUESTRA	INSULI.7M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA 9ª MUESTRA	INSULI.9M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA A LOS 30 MINUTOS	INSU.30	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA A LOS 240 MINUTOS	INSU.240	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INSULINA BASAL	INSULI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
INSULINA BASAL PARA CURVA DE INSULINA	INSU.BASAL	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
INTERFERON GAMMA	INTER_G	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	
INTERLEUCINA - 6	IL6	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
INTERLEUCINA 10	IL10	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
INTERLEUCINA 2	IL2	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
INTERLEUCINA 2 RECEPTOR (58ANTIGENO CD 25 SOLUBLE)	IL_2R	Plasma EDTA congelado	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	
INTERLEUCINA-1 BETA	IL1	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
inv (16): CBF-MYH11	MH105	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
inv (16/t16;16): CBFb	FSH16	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
Inv (3) / t (3;3)	FSH38	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
ISOELECTROENFOQUE EN ORINA	BAND.O	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	HOSPITAL	Proteína/marcadores	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
ISOENZIMAS DE LA AMILASA (PERFIL)	ISOAMILASA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ISOENZIMAS DE LA CPK	ISOCPK	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ISOENZIMAS FOSFATASA ALCALINA	ISOFAL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ISOENZIMAS LDH	ISOLDH	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ISOLEUCINA	LILEUC	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
ISOLEUCINA	ISOLEU	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ISOLEUCINA	OILEUC	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ISOVALERIL CARNITINA C5	C5CAR	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ISOVALERIL CARNITINA C5 EN SANGRE SECA	C5CARN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
KAPPA LIBRE EN LCR	KAPPAL_LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Proteina/marcadores	
LACTATO LCR	LA_LCR.UI	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LACTATO 1 MINUTO	LACTATO1	PLASMA	Tubo FLUORURO/OXALATO Tapón GRIS	Número pequeño	HPS	Lab.Urgencias	Prueba funcional. Requiere tubo Fluoruro Oxalato tapón gris y asignación de orden de tubos de muestra. Solicitar cita en Lab. De urgencias HPS 46183
LACTATO 10 MINUTOS	LACTATO10	PLASMA	Tubo FLUORURO/OXALATO Tapón GRIS	Número pequeño	HPS	Lab.Urgencias	Prueba funcional. Requiere tubo Fluoruro Oxalato tapón gris y asignación de orden de tubos de muestra. Solicitar cita en Lab. De urgencias HPS 46183
LACTATO 20 MINUTOS	LACTATO20	PLASMA	Tubo FLUORURO/OXALATO Tapón GRIS	Número pequeño	HPS	Lab.Urgencias	Prueba funcional. Requiere tubo Fluoruro Oxalato tapón gris y asignación de orden de tubos de muestra. Solicitar cita en Lab. De urgencias HPS 46183
LACTATO 3 MINUTOS	LACTATO3	PLASMA	Tubo FLUORURO/OXALATO Tapón GRIS	Número pequeño	HPS	Lab.Urgencias	Prueba funcional. Requiere tubo Fluoruro Oxalato tapón gris y asignación de orden de tubos de muestra. Solicitar cita en Lab. De urgencias HPS 46183
LACTATO 5 MINUTOS	LACTATO5	PLASMA	Tubo FLUORURO/OXALATO Tapón GRIS	Número pequeño	HPS	Lab.Urgencias	Prueba funcional. Requiere tubo Fluoruro Oxalato tapón gris y asignación de orden de tubos de muestra. Solicitar cita en Lab. De urgencias HPS 46183

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
LACTATO BASAL	LACTATOB	PLASMA	Tubo FLUORURO/OXALATO Tapón GRIS	Número pequeño	HPS	Lab.Urgencias	Prueba funcional. Requiere tubo Fluoruro Oxalato tapón gris y asignación de orden de tubos de muestra. Solicitar cita en Lab. De urgencias HPS 46183
LACTATO VENOSO (UI)	LAC_UI.U	PLASMA fluoruro	Tubo FLUORURO/OXALATO Tapón GRIS	LACTATO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LACTOSA CURVA (PERFIL)	LACTOSAC	suero	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Central	Las pruebas de S.O LACTOSA (curvas LACTOSA) requieren CITA PREVIA en el 46191. Extracción en el hospital Perpetuo Socorro
LAMOTRIGINA	LAMO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
LAUROIL CARNITINA	C12	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
LAUROIL CARNITINA C12 EN SANGRE SECA	C12CARN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
LDH	LDH	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
LDH (ASC)	LDHASC.U	ASCITICO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	ASCITICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LDH (LCR)	LDHLCR.U	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LDH (SINOV)	LDHSIN.U	SINOVIAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	SINOVIAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LDH LÍQUIDO BIOLÓGICO	LDHBIO.U	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LDH LIQUIDO PLEURAL	LDHPLE.U	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LDL COLESTEROL	LDL_COLE	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IGG IFI	LEGGIFI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IGM IFI	LEGMIFI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
LEGIONELLA PNEUMOPHILA SER1 IGG EIA	LEGIQG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
LEGIONELLA PNEUMOPHILA SER1 IGM EIA	LEGIOM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
LEISHMANIA IGG	LEISG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
LEPTOSPIRA IGM	LEPTOM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
LEPTOSPIRA IGM EN LCR	LEPTOM.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
LEUCINA	LLEUC	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
LEUCINA	LEUCIN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
LEUCINA	OLEUC	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
LEUCINA EN SANGRE SECA	LEUCI_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
LEUCOCITOS	LEU	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
LEUCOCITOS PERITONEAL DIALISIS	LEUPER.U	PER DIALIS	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS (ASC)	LEUASC.U	ASCITICO	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS (LCR)	LEULCR.U	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS (SINOV)	LEUSIN.U	SINOVIAL	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS LÍQUIDO BIOLÓGICO	LEUBIO.U	L.Biológico	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS LIQUIDO PLEURAL	LEUPLE.U	PLEURAL	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS MONONUCLEARES PERITONEAL DIALISIS	MONO%PER.U	PER DIALIS	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS MONONUCLEARES (ASC)	MONO%A.U	ASCITICO	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS MONONUCLEARES (LCR)	MONO%C.U	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
LEUCOCITOS MONONUCLEARES (SINOV)	MONO%S.U	SINOVIAL	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS MONONUCLEARES LÍQUIDO BIOLÓGICO	MONO%B.U	L.Biológico	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS MONONUCLEARES LIQUIDO PLEURAL	MONO%P.U	PLEURAL	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS PMN (LCR)	PMN%LC.U	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS PMN LÍQUIDO BIOLÓGICO	PMN%BI.U	L.Biológico	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS PMN LIQUIDO PLEURAL	PMN%PL.U	PLEURAL	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS PMN PERITONEAL DIALISIS	PMN%PER.U	PER DIALIS	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS POLIMORFONUCLEARES (ASC)	PMN%AS.U	ASCITICO	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS POLIMORFONUCLEARES (SINOV)	PMN%SI.U	SINOVIAL	Tubo EDTA Tapón ROSA	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
LEUCOCITOS TIRA DE ORINA	LEUC	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
LEUCORREDUCCIÓN	LEUCOS	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	Banco de Sangre	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
LEVETIRACETAM (KEPPRA)	LEVETI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
LEVODOPA	LEVO	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
LH	LH	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
LH 2ª MUESTRA	LH.2M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
LH 3ª MUESTRA	LH.3M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
LH 4ª MUESTRA	LH.4M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
LH 5ª MUESTRA	LH.5M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
LIDOCAINA	LIDO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
LINFOCITOS	LIN%	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
LINFOCITOS (VALOR ABS.)	LIN#	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
LIPASA	LIP	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
LIPOCHIP	LIPOCHIP	SANGRE TOTAL (EDTA)	(*)Tubo CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	PROGENIKA	Requiere solicitud y cuestionario clínico específico de PROGENIKA cumplimentado por su médico.LAS EXTRACCIONES SOLO SE PUEDEN REALIZAR DE LUNES A MIERCOLES. Avisar a Preanalitica 48924
LIPOPROTEINA (A)	LIP_A	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
LISINA	LLISIN	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
LISINA	LISINA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
LISINA	OLISIN	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
LISOZIMA	LISOZ	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
LISOZIMA EN LIQUIDO PLEURAL	LISOZP	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	REFERENCE	
LISOZIMA EN ORINA	OLISOZ	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
LISTERIA MONOCYTOGENES IGG	LISTE	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
LITIO	LITIO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	
L-PUFA (ACIDOS GRASOS OMEGA3 OMEGA6 PERFIL)	L_PUFA	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
LUFORAN TEST PARA FSH	T.LUFO.FSH	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
LUFORAN TEST PARA LH	T.LUFO.LH	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
MACROAMILASA	MACRO_AMIL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
MACROPROLACTINA	MACRO_PROL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
MAGNESIO	MG	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
MAGNESIO EN 18 HORAS	OMG18	Orina de 18 horas	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
MAGNESIO EN 24 HORAS	OMG24	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
MAGNESIO EN ORINA	OMG	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
MALONILCARNITINA (C3DC)	C3DC	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
MALONILCARNITINA C3DC EN SANGRE SECA	C3DCCARN_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
MANGANESO	MN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
MÁXIMO PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE FENILALANINA	FASECA_MPV	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción
MDMA EN SALIVA	MDMA_SAL	Saliva	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
MELATONINA	MELATO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
MENINGOCOCO IGG	MENINGO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
MERCURIO EN ORINA	OHG	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
MERCURIO EN SANGRE	HG	SANGRE TOTAL (EDTA)	(*) Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	Requiere tubo especial de EDTA . Pedir tubo e instrucciones en PREANALITICA 48924.
METADONA	OMETA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
METAMFETAMINA EN SALIVA	METAM_SAL	Saliva	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
METANEFRINA PLASMÁTICA	METAN	Plasma EDTA congelado	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	
METANEFRINA URINARIA	OMET	ORINA 24H ACIDA	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
METANEFRINAS EN ORINA PERFIL	METANEF	ORINA 24H ACIDA	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
METANEFRINAS URINARIAS TOTALES	OMETAN	ORINA 24H ACIDA	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
METANFETAMINAS	MAMP.U	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
METANOL EN ORINA	OMETANOL	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
METANOL EN SANGRE TOTAL	METANOL	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
METFORMINA	METFOR	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
METHB- METAHEMOGLOBINA	FMETHB.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
METIONINA	LMETIO	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
METIONINA	METION	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
METIONINA	OMETIO	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
METIONINA EN SANGRE SECA	METIO_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
METIONINA SULFO.	METION_S	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
METOPIRONA TEST PARA ACTH	T.MET.ACTH	PLASMA EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra .Indicar ACTH POST en el tubo de muestra tras estímulo.
METOPIRONA TEST PARA CORTISOL	T.METO.COR	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra .Indicar CORTISOL POST en el tubo de muestra tras estímulo.
METOTREXATE	METO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
METOTREXATE 10ª MUESTRA	METO10	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	Indicar el orden de muestra en el tubo
METOTREXATE 2ª MUESTRA TRAS INFUSIÓN	METO2	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	Indicar el orden de muestra en el tubo
METOTREXATE 3ª MUESTRA	METO3	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	Indicar el orden de muestra en el tubo
METOTREXATE 4ª MUESTRA	METO4	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	Indicar el orden de muestra en el tubo
METOTREXATE 5ª MUESTRA	METO5	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	Indicar el orden de muestra en el tubo
METOTREXATE 6ª MUESTRA	METO6	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	Indicar el orden de muestra en el tubo
METOTREXATE 7ª MUESTRA	METO7	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	Indicar el orden de muestra en el tubo

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
METOTREXATE 8ª MUESTRA	METO8	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	Indicar el orden de muestra en el tubo
METOTREXATE 9ª MUESTRA	METO9	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	Indicar el orden de muestra en el tubo
METOXI-TIRAMINA URINARIA	OMETOX	ORINA 24H ACIDA	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
MEXILETINA	MEXILE	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
MG CA/DL FILTRADO GLOMERULAR EN ORINA	OCAGLO	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
MICROALBUMINARIA DE 18 HORAS	MALB_18	ORINA 18 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
MICROALBUMINURIA	MALB	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
MICROALBUMINURIA 24 HORAS	MALB_24	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
MICRODELECCIONES DEL CROMOSOMA Y	MSV03	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
MIOGLOBINA	MIOG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
MIOGLOBINA EN ORINA	OMIO	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
MIRISTOLEIL CARNITINA C14:1	C14_1	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
MIRISTOLEIL CARNITINA C14:1 EN SANGRE SECA	C141CARN_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
MISTIROIL CARNITINA C14	C14	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
MISTIROIL CARNITINA C14 EN SANGRE SECA	C14CARN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
MLAC SCREEN	MLAS	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
MLPA EN REGIÓN PRADER WILLI/ANGELMAN	MSV05	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
MOLIBDENO	MO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
MOM AFP LÍQUIDO AMNIOTICO	MOMAFP	Líquido amniótico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Metabolismo	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
MOM BHCG LIBRE	MOMBET	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde
MOM DE AFP	M_AFP	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde
MOM PAPP-A	MOMPAP	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde
MOM TN	MOMNTD	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde
MONOACETILMORFINA EN SALIVA	MAMORF_SAL	Saliva	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
MONOCITOS	MON%	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
MONOCITOS (VALOR ABS.)	MON#	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
MONOCLORAMINA EN AGUA DIÁLISIS	MONOCLORA	AGUA DIALISIS	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
	MONOSIALO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
MORFINA	MOP	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
MORFINA EN SALIVA	MORFI_SAL	Saliva	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
MPTT-LA	MPTL	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
MTHFR c677t	MH203	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
MULTÍMEROS FACTOR VON WILLEBRAND	MULTI_FVW	PLASMA CITRATO CONGELADO	Tubo CITRATO Tapón AZUL	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe de actividad y antígeno del factor Von Willebrand
MUTACIÓN GEN DPYD (TOXICIDAD 5-FLUORURACILO)	DPYD_MUTA	Sangre EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere autorización e informe clínico
MUTACIÓN DEL GEN TTR AMILOIDOSIS FAMILIAR	GEN_TTR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere autorización e informe clínico. Antecedentes familiares.
MUTACIÓN GEN JACK 2	MH109	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
MUTACIONES DEL EXON 12 DEL GEN JAK2	MH210	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
MUTACIONES DEL GEN CALR	MH110	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
MUTACIONES DEL GEN MPL	MH209	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
MUTACIONES GEN ABL	MH108	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
MUTACIONES RECURRENTES DEL GEN RET	MCA07	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG	MYCOG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM	MYCOM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
N-ACETIL GLUCOSAMINIDASA EN ORINA	NAG	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
N-ACETILCISTEINA (TTL)	NAC	Sangre heparina	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	Tubo de heparina verde sin gel
NEUROPÉPTIDO Y PLASMÁTICO	NEUROPEPY	Plasma EDTA congelado	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	
NEUTRÓFILOS	NEU%	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
NEUTRÓFILOS (VALOR ABS.)	NEU#	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
NIQUEL	NI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
NITRITOS EN AGUA DE DIÁLISIS	NITRI_AGUA	AGUA DIALISIS	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
NITRITOS TIRA DE ORINA	NITRI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
NITROGENO EN HECES	NITRO	HECES DE 24 HORAS	Cont.heces 24 H	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Contenedor para heces de boca ancha
NIVELES DE AZATIOPRINA (6-MERCAPTOPURINA) EN SUERO	AZATIOPRIN	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
NIVELES DE VORICONAZOL	VORICO	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
NORADRENALINA PLASMÁTICA	NORADR	Plasma EDTA congelado	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	
NORADRENALINA UR. /CREATININA	NA.CR	ORINA ACIDA aislada	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	HOSPITAL	Hormonas	Niños con dificultad para recoger orina de 24 h. La muestra de orina se acidificará en el lab de Hormonas

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
NORADRENALINA URINARIA	ONORAD	ORINA 24H ACIDA	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
NORCLOBAZAM	NORCLOBA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
NORMETANEFRINA PLASMÁTICA	NORMETA	Plasma EDTA congelado	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	
NORMETANEFRINA URINARIA	ONORME	ORINA 24H ACIDA	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
NSE- ENOLASA ESPECIFICA NEURONAL	NSE	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
NT-PROBNP	NT_PROBNP	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	SE HA MODIFICADO LA MUESTRA A SUERO (Antes plasma EDTA)
NUCLEOTIDASA	NUCLET	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
NUVACTHEN TEST PARA ANDROSTENDIONA	T.NUVA_AND	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
NUVACTHEN TEST PARA CORTISOL	T.NUVA.COR	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
NUVACTHEN TEST PARA DHEAS	T.NUVA_DHE	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
NUVACTHEN TEST PARA 17-OH PROGESTERONA	T.NUVA.17	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
O2CAP-CAPACIDAD OXIGENACIÓN HB	O2CAP.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
O2CT- CONCENTRACIÓN O2 TOTAL	CTO2.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
O2HB- OXIHEMOGLOBINA	FO2HB.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
OCTADECANOIL CARNITINA C18	C18	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
OCTADECANOIL CARNITINA C18 EN SANGRE SECA	C18CARN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
OCTANOIL CARNITINA C8	C8	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
OCTANOIL CARNITINA C8 EN SANGRE SECA	C8CARN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
OLANZAPINA	OLANZ	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
OLIGOSACARIDOS (IBC)	OLIGOS	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	IBC(EXCLUSIVO PEDIATRIA)	Requiere autorización e informe clínico

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
OLIGOSACÁRIDOS EN ORINA	OLIGO	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
OPIACEOS	OOPIA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
ORNITINA	LORNIT	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
ORNITINA	ORNIT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ORNITINA	OORNIT	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ORNITINA EN SANGRE SECA	ORNIT_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
ORO EN SUERO	AU_SUERO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
OSMOLAL GAP ORINA	OGAPOR.U	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	
OSMOLAL GAP SUERO	OGAPSU.U	SUERO/plasma heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	SUERO blanca (urgencias)	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	También se admite tubo tapón amarillo de suero.
OSMOLALIDAD CALCULADA EN ORINA	OSCALO.U	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	
OSMOLALIDAD CALCULADA EN SUERO	OSCAL.S.U	SUERO	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	SUERO blanca (urgencias)	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	También se admite tubo tapón amarillo de suero.
OSMOLALIDAD EN HECES	OSM_HECES	HECES	Conten.Heces 100ml	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	
OSMOLALIDAD EN ORINA	OSMORI.U	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	
OSMOLALIDAD EN SUERO	OSMSUE.U	SUERO	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	SUERO blanca (urgencias)	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	También se admite tubo tapón amarillo de suero.
OSTEOCALCINA	OSTEOC	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
OTOFERLINA	MSO05	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
OTRAS VARIANTES DE HEMOGLOBINA %	VARHB%	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel
OTROS FENOTIPAJES	FENOTIPAJE	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
OXCARBAZEPINA	OXCARB	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
P50	P50.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
PACIENTE (TP)	TPS	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
PACIENTE (TP)	TPS.S	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
PACIENTE (TR)	TRS	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
PACIENTE (TT)	TTS	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
PACIENTE (TTPA)	TTPS	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
PALMITOIL CARNITINA C16	C16	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PALMITOIL CARNITINA C16 EN SANGRE SECA	C16CARN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
PALMITOLEIL CARNITINA C16:1	C16_1	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PALMITOLEIL CARNITINA C16:1 EN SANGRE SECA	C161CARN_S	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
PAPP-A	PAPP_A	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina lito con gel tapón verde
PARACETAMOL EN ORINA	APAP.U	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
PARACETAMOL URGENTE	PARAC.U	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
PAROTIDITIS IGG	PAROG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PAROTIDITIS IGM	PAROM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PARVOVIRUS B19 IGG	PARVOG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PARVOVIRUS B19 IGM	PARVOM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCO2	PCO2.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
PCR VIRUS HERPES TIPO 6	PCRH6	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR ADENOVIRUS EN LCR	PCRA.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
PCR BARTONELLA	PCRBAR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR BORRELIA EN LCR	PCRB.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR CITOMEGALOVIRUS	PCRCMV	Plasma EDTA	(*2 Tubos EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA
PCR CITOMEGALOVIRUS EN LCR	PCRCMV.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR COXIELLA	PCRCOX	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR COXIELLA BURNETTI EN LCR	PCRC.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR DENGUE	PCRDENGUE	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR ENTAMOEBA HISTOLYTICA	PCREHIS	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR ENTEROVIRUS EN LCR	PCRE.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR FLAVIVIRUS EN LCR	PCRFLA.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR HISTOPLASMA CAPSULATUM	PCRHIST	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR LEISHMANIA	PCRLEIS	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR LEPTOSPIRA	PCRLEPTO	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR PARVOVIRUS B19	PCRPAR	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR PLASMODIUM	PCRPLASM	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR TOXOPLASMA	PCRTOXO	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR TOXOPLASMA EN LCR	PCRT.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR TREPONEMA	PCRTREPO	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
PCR TROPHERYMA WHIPPLEI	PCRTR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR TROPHERYMA WHIPPLEI EN LCR	PCRTR.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR ULTRASENSIBLE	PCRULT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteína/marcadores	
PCR VIRUS BK	PCRBK	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS BK EN LCR	PCRBK.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS BK EN SANGRE TOTAL	PCRBK.SAN	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS CHIKUNGUNYA	PCRCHIKU	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS EPSTEIN BARR	PCREBV	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS EPSTEIN BARR EN LCR	PCREBV.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS HERPES SIMPLE	PCRHS	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS HERPES SIMPLE EN LCR	PCRHS.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS HERPES SIMPLE TIPO 1 EN LCR	PCRVHS1	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS HERPES TIPO 6 EN LCR	PCRH6.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS HERPES TIPO 7	PCRH7	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS HERPES TIPO 7 EN LCR	PCRH7.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS HERPES TIPO 8	PCRH8	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS HERPES TIPO 8 EN LCR	PCRH8.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
PCR VIRUS JC	PCRVIRUSJC	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS JC	PCRJC	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS JC EN LCR	PCRJC.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS JC EN SANGRE TOTAL	PCRJC.SAN	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS RUBEOLA	PCRRUB	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS SARAMPION	PCRSAR	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS SV-40 EN LCR	PCRSV.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS SV-40 EN ORINA	PCRSV	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS SV-40 EN SANGRE TOTAL	PCRSV.SAN	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS VARICELA ZOSTER	PCRVZ	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PCR VIRUS VARICELA ZOSTER EN LCR	PCRVZ.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PEPSINOGENO	PEPSIN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PEPTIDO BETA 2 AMILOIDE (1-42) EN LCR	B2AMIL_LCR	LCR CONGELADO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
PEPTIDO C	PEPC	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
PÉPTIDO C 2ª MUESTRA	PEPC.2M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
PÉPTIDO C 3ª MUESTRA	PEPC.3M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
PÉPTIDO C 4ª MUESTRA	PEPC.4M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
PÉPTIDO C 5ª MUESTRA	PEPC.5M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
PÉPTIDO C 6ª MUESTRA	PEPC.6M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
PÉPTIDO C 7ª MUESTRA	PEPC.7M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
PEPTIDO C EN ORINA	OPEPC	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
PEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO (VIP)	VIP	Plasma EDTA congelado	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	
PERFIL CARDIACO BIOQUIMICA	CARDIACO	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
PERFIL GENERAL BIOQUIMICA	GENERAL	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
PERFIL HEPÁTICO BIOQUIMICA	HEPATICO	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
PERFIL PREOPERATORIO BIOQUIMICA	PREOPERA	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
PERFIL RENAL BIOQUIMICA	RENAL	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
PERFIL UCI BIOQUIMICA	UCI	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
PH	PHG.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
PH TIRA DE ORINA	PH	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
PH HECES	PHHECES	HECES DE 24 HORAS	Cont.heces 24 H	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Contenedor para heces de boca ancha
PH LIQUIDO PLEURAL	PHPLE.U	PLEURAL	Jeringa heparinizada	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Urgencias	Requiere toma de muestras en condiciones anaeróbicas (jeringa gasometría)
PIRUVATO	PIRUV.U	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Tubo heparina litio con gel tapón verde
PIRUVATO KINASA ERITROCITARIA	PKE	Sangre heparina	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	Tubo de heparina verde sin gel
PLAQUETAS	PLT	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
PLASMINÓGENO (CROMOGÉNICO)	PLG	SANGRE	(*) 2 Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 2 tubos de CITRATO AZUL
PLASMODIUM FALCIPARUM	PLASMO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PLOMO	PB	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
PLOMO EN ORINA DE 24 HORAS	OPB24	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
PLOMO ORINA	OPB	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
PNEUMOCOCO IGG	NEUMO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PO2	PO2.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
POLIMORFISMO Q80K	GENQ80K	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	MAJADAHONDA	Envío de LUNES a JUEVES.
POLIOVIRUS ANTICUERPOS IGG	POLIOG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
POLIPEPTIDO PANCREATICO	POLIPEP	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PORFIRINAS en ORINA (PERFIL)	PORFI	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	Orina de 24 horas protegida de la luz. La muestra de orina debe protegerse de la luz con papel aluminio. Indicar diuresis
PORFIRINAS URINARIAS TOTALES	OPORF	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	Orina de 24 horas protegida de la luz. La muestra de orina debe protegerse de la luz con papel aluminio. Indicar diuresis
PORFOBILINOGENO (PBG)	PORFO	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
PORFOBILINÓGENO DESAMINASA EN SANGRE TOTAL	PBG_DES	Sangre heparina	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	Cód. barras blanco	HOSPITAL	REFERENCE	Tubo de heparina verde sin gel
POTASIO	K	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
POTASIO PERITONEAL DIALISIS	PK.U	PER DIALIS	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
POTASIO (GASOMETRÍA)	K_G.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
POTASIO EN 18 HORAS	OK18	Orina de 18 horas	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
POTASIO EN 24 HORAS	OK24	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
POTASIO EN HECES	K_HECES	HECES	Conten.Heces 100ml	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
POTASIO EN ORINA	OK	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
POTASIO LÍQUIDO BIOLÓGICO	KBIO.U	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
PREALBUMINA EN SANGRE	PREALB	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteína/marcadores	
PRECIPITINAS SUERO DE CANARIO	PRECAN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRECIPITINAS SUERO DE GALLINA	PREGAL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRECIPITINAS SUERO DE PALOMA	PREPAL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRECIPITINAS ASPERGILLUS TERREUS	PREASP_TER	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRECIPITINAS SUERO DE PERIQUITO	PREPER	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRECIPITINAS THERMOACTYNO MYCES	PRETHE	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRECIPITINAS A EXCREMENTO DE PERIQUITO	PREPER_EXC	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRECIPITINAS A EXCREMENTO DE CANARIO	PRECAN_EXC	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRECIPITINAS A EXCREMENTO DE PALOMA	PREPAL_EXC	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRECIPITINAS A PENICILLIUM FREQUENTENS	PREPEF	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRECIPITINAS A PLUMAS DE PERIQUITO	PREPER_PLU	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRECIPITINAS ASPERGILLUS FUMIGATUS	PREASP_FUM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRECIPITINAS MICROPOLYSPORA FAENI	PREMIC	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRECIPITINAS PENICILLIUM NOTATUM	PREPEN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRECIPITINAS PLUMAS DE CANARIO	PRECAN_PLU	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRECIPITINAS PLUMAS DE PALOMA	PREPAL_PLU	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRIMIDONA	PRIMI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PROCALCITONINA	PCT	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	Tubo heparina litio con gel tapón verde. También se admite tubo SUERO ROJO.

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
PRODUCTOS DEGRADACIÓN FIBRINA	PDF	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
PROGESTERONA	PROG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
PROINSULINA BASAL	PROINS	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	REFERENCE	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
PROINSULINA 3ª MUESTRA	PROINS.3M	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	REFERENCE	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
PROINSULINA EN 2ª MUESTRA	PROINS.2M	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	REFERENCE	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
PROINSULINA EN 4ª MUESTRA	PROINS.4M	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	REFERENCE	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
PROINSULINA EN 5ª MUESTRA	PROINS.5M	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	REFERENCE	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
PROINSULINA EN 6ª MUESTRA	PROINS.6M	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	REFERENCE	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
PROLACTINA	PROL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
PROLACTINA 2ª MUESTRA	PROL.2M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
PROLACTINA 3ª MUESTRA	PROL.3M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
PROLINA	LPROL	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
PROLINA	PROLIN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PROLINA	OPROL	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PROLINA EN SANGRE SECA	PROLIN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
PROPÉPTIDO AMINOTERMINAL DEL COLÁGENO TIPO I (P1NP)	PROP_PROCO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PROPIONIL CARNITINA C3	C3CAR	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PROPIONIL CARNITINA C3 EN SANGRE SECA	C3CARN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
PROSTAGLANDINA E2 EN ORINA	OPGE2	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PROTEINA 14-3-3 PRIONICA LCR	PRION_LCR	LCR CONGELADO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
PROTEINA PERITONEAL DIALISIS	PPROT.U	PER DIALIS	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
PROTEINA TOTAL LIQUIDO PLEURAL	PTPLE.U	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
PROTEINA 14-3-3 PRIONICA SANGRE	PRION_SAN	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
PROTEINA AMILOIDE A	AMILOIDE	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PROTEINA C	PC	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
PROTEINA C COAGULATIVA	PCCO	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
PROTEINA C COAGULATIVA	PCIC	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
PROTEÍNA C CROMOGÉNICA	PCC	SANGRE	(*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
PROTEINA C REACTIVA	PCR	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
PROTEINA C REACTIVA LÍQUIDO BIOLÓGICO	PCRBIO	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
PROTEINA FIJADORA DE RETINOL	PFRET	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
PROTEINA RELACIONADA PTH	PTHR	Plasma EDTA congelado	(*EDTA tubo especial APROTININA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	Requiere tubo especial de EDTA con APROTININA. Pedir en PREANALITICA 48924
PROTEINA S	PS	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
PROTEINA S (COAGULIMÉTRICA)	PSCO	SANGRE	(*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
PROTEINA S LIBRE	PSL	SANGRE	(*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
PROTEINA S-100	S100	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PROTEÍNA SEPTINA 9 METILADA PLASMÁTICA	SEPTINA9	Plasma EDTA congelado	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	
PROTEINA TAU FOSFORILADA EN LCR	TAUP_LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
PROTEINA TAU TOTAL EN LCR	TAU_LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
PROTEINA TOTAL (ASC)	PTASC.U	ASCITICO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	ASCITICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
PROTEINA TOTAL (LCR)	PTLCR.U	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
PROTEINA TOTAL (SINOV)	PTSIN.U	SINOVIAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	SINOVIAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
PROTEINA TOTAL LÍQUIDO BIOLÓGICO	PTBIO.U	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
PROTEINAS TIRA DE ORINA	PROTE	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
PROTEINAS TOTALES	PROT	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
PROTEINOGRAMA EN LCR	PROT_LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Proteina/marcadores	
PROTEINOGRAMA EN ORINA (perfil)	OPTG	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
PROTEINOGRAMA EN SUERO (PERFIL)	PTG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
PROTEINURIA	OPRO	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
PROTEINURIA EN 18 HORAS	OPRO18	Orina de 18 horas	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
PROTEINURIA EN 24 HORAS	OPRO24	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
PROTOPORFIRINAS EN SANGRE TOTAL	PROTOPOR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRUEBA DE LA TINTA CHINA	TINTA.U	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
PRUEBA DEL ETANOL	TETN	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
PRUEBA EN ORINA PARA LAB.EXTERNO REFERENCE	EXT_ORINA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
PRUEBA EN SUERO PARA LAB. EXTERNO REFERENCE	EXT_SUERO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PRUEBA FUNCIONAL PARA PROINSULINA (PERFIL)	PFUN.PROIN	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
PSA LIBRE	PSAL	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
PSA TOTAL	PSA	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
PSEUDOCOLINESTERASA	CHE	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
PTERINAS EN ORINA (SJDD)	PTERINAS	ORINA (congelada)	(*) 4 Tubos 10 ml ORINA	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	H.SAN JOAN DE DEU	Requiere autorización e informe clínico. 30 ml mínimo (3-4 tubos muestra)
PTH	PTH	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	HOSPITAL	Hormonas	Extracción en HIC/HPS para separación inmediata del suero
PTH INTRAOPERATORIA BASAL	PTHI_B.U	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Indicar PTH BASAL en el tubo
PTH INTRAOPERATORIA POST	PTHI_P.U	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Indicar PTH POST en el tubo
PTT-LA	PTTL	SANGRE	(*)3Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
QUANTIFERON TB EN SANGRE TOTAL	QUANTIFER	PLASMA ESPECIAL	(*) 3 Tubos especiales de QUANTIFERON TB GOLD	Número pequeño	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	Requiere 3 tubos de extracción especiales. Solicitar en PREANALITICA (48924)
QUETIAPINA	QUETI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
QUILOMICRONES EN LÍQUIDO PLEURAL	QUILO_P	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
QUILOMICRONES EN SUERO	QUILO_S	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
QUIMOTRIPSINA	QTRIPS	HECES	Conten.Heces 100ml	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
RAPAMICINA	RAPA	Sangre EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	Bioq.especial	
RATIO (TR)	TRR	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
RATIO (TT)	TTR	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
RATIO (TTPA)	TTPR	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
RATIO LACS / LACC	RLAC	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
RDW	RDW	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
RECuento DE ADDIS (PERFIL)	REC_ADDIS	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	HOSPITAL	Lab.Urgencias	Requiere orina recién emitida
REGION 11q22.3 ATM	FSH08	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REGION 13q14	FSH11	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REGION 13q14 RB1	FSH12	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REGION 17p13.1 p53	FSH17	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REGION 1p32/1q21	FSH37	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REGIÓN 20q12	FSH19	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REGIÓN 21q22	FSV12	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REGIÓN 4q12 PDGFRA	FSH29	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REGIÓN 5q31	FSH02	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REGIÓN 5q33 PDGFRB	FSH25	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REGIÓN 6q23 MYB	FSH23	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REGION 7q22-35	FSH33	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
REGIÓN 7q31	FSH03	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REGION 9p21-CDKN2A	FSH34	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REGIÓN CENTROMÉRICA 12p11-q11	FSH21	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REGIÓN CENTROMÉRICA 8p11-q11	FSH20	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REGIÓN CENTROMÉRICA CROMOSOMA 18	FSV11	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REIBERGRAMA	REIBER	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Proteina/marcadores	
RELACIÓN CALCIO/ CREATININA	OCAOCRE	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
RELACIÓN CALCIO/CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS.	CA.CRE	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
RELACIÓN KAPPA LIBRE/ LAMBDA LIBRE EN SUERO	KAL.LAL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
RELACION KAPPA/LAMBDA	KA.LA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
RELACION KAPPA/LAMBDA ORINA	OKA.LA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
RELACION LACTICO/PIRUVICO LCR	L_P_LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
RENINA PLASMATICA 2ª MUESTRA	RENINA.2M	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
RENINA PLASMATICA 3ª MUESTRA	RENINA.3M	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
RENINA POST ESTIMULO	RENPOS	Plasma EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar POST en el tubo .
REORDENAMIENTO BCL2 18q21	FSH24	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
REORDENAMIENTO BCL6 3q27	FSH01	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REORDENAMIENTO E2A 19p13	FSH22	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REORDENAMIENTO ETV6 12p13	FSH28	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REORDENAMIENTO GEN MALT1 EN 18q21	FSH18	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REORDENAMIENTO IgH (B)	RB	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REORDENAMIENTO IGH 14q32	FSH14	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REORDENAMIENTO MLL 11q23	FSH09	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REORDENAMIENTO MYC	FSH27	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REORDENAMIENTO RARA 17q21	FSH26	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REORDENAMIENTO TCR (T)	RT	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
REORDENAMIENTOS PAX5	FSH39	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
RESISTENCIA GLOBULAR OSMÓTICA (HIPORRESISTENCIA)	RGO_HIPO	SANGRE TOTAL (EDTA)	(*2 Tubos EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	Requiere 2 tubos de EDTA y otros 2 tubos EDTA sangre control de otro paciente. Envío inmediato
RESISTENCIA A LA PROT. C ACTIV.V	RPCV	SANGRE	(*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
RESISTENCIA ANTIVIRALES VHB	RESIS_VHB	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
RESISTENCIA GLOBULAR OSMÓTICA	RGO	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
RESISTENCIA GLOBULAR OSMÓTICA (HIPERRESISTENCIA)	RGO_HIPER	SANGRE TOTAL (EDTA)	(*2 Tubos EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	Requiere 2 tubos de EDTA y otros 2 tubos EDTA sangre control de otro paciente. Envío inmediato

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
RESISTENCIA GLOBULAR OSMÓTICA (PERFIL)	RGO	SANGRE TOTAL (EDTA)	(*)2 Tubos EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	Requiere 2 tubos de EDTA y otros 2 tubos EDTA sangre control de otro paciente. Envío inmediato
RETICULOCITOS	RETI	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
RETICULOCITOS (VALOR ABS.)	RET#	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
RH	RH	SANGRE	EDTA 10ml BANCO Tapón violeta	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
RHB- HEMOGLOBINA REDUCIDA	FHHB.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
RICKETTSIA CONNORI IGG	RCONG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
RICKETTSIA CONNORI IGM	RCONM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
RICKETTSIA TYPHI IGG	RTYPG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
RICKETTSIA TYPHI IGM	RTYPM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
RIESGO DEFECTOS TUBO NEURAL	R_DTN	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde
RIESGO GLOBAL TRAS SREENING COMBINADO.	R_TRAS	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde
RIESGO SEGÚN EDAD PARA TRISOMÍA 21	RIES_E	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde
RIESGO TRISOMÍA 21 TRAS ESTUDIO COMBINADO.	RIES21	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde
RIESGO TRISOMIA 13	RIES13	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
RIESGO TRISOMÍA 18 TRAS ESTUDIO COMBINADO	RIES18	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde
RISPERIDONA	RISPER	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
RISPERIDONA TOTAL	RISPRTOT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
RNA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS E	RNAVHE	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
RNA HCV (HEPATITIS C) EN LAVADO SEMINAL	HCV_SEMEN	Lavado seminal	Contenedor estéril boca ancha 100ml	Cód. barras blanco	CERHA	REFERENCE	Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA
RNA VIRUS HEPATITIS DELTA	RNAVHD	SUERO CONGELADO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
ROJOS NUCLEADOS (%)	NRB%	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
ROJOS NUCLEADOS (VALOR ABS.)	NRB#	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
ROSA DE BENGALA	ROSA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
ROSA DE BENGALA EN LCR	ROSA.LCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
RUBEOLA IGG	RUBEG	SUERO	Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
RUBEOLA IGM	RUBE_M	SUERO	Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
RUBEOLA IGM	RUBEM	SUERO	Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
SALMONELLA TYPHI H	SALMH	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
SALMONELLA TYPHI O	SALMO	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
SARAMPION IGG	SARAMG	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
SARAMPIÓN IGG EN LCR	SARAMG.LCR	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
SARAMPION IGM	SARAMM	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
SARCOSINA	LSARCO	L.C.R.	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
SARCOSINA	SARCOS	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
SARCOSINA	OSARCO	ORINA AISLADA	Tube 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
SATURACIÓN DE TRANSFERRINA	SATTRF	SUERO	Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
SBC- BICARBONATO ESTÁNDAR	SBC.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
SBE- EXCESO DE BASE ESTÁNDAR	SBEC.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
SCC ANTÍGENO CARCINOMA CÉLULAS ESCAMOSAS	SCC	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
SCREENING 1ER TRIMESTRE EMBARAZO (PERFIL)	SC1TRIM	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde
SCREENING 2DO TRIMESTRE EMBARAZO (PERFIL)	SC2TRIM	Plasma Heparina	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde
SCREENING GLICOSAMINOGLICANOS	BERRY	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
SECRECIÓN DE PROLACTINA TEST	T.SECR.PRO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
SECUENCIACIÓN GEN CD46 (MCP), SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO	GEN_MCP	Sangre EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere autorización e informe clínico
SEDIMENTO DE ORINA	SEDIM	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
SELENIO	SE	SUERO	Tubo suero Tapón AZUL oscuro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere tubo especial con silicona Trace tapón AZUL oscuro
SELENIO EN ORINA	OSE	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
SEMINOGRAMA ESTUDIO ESTERILIDAD (perfil)	SEM__EST	SEMEN	Contenedor esteril boca ancha 100ml	Cód. barras blanco	CERHA	Andrología	Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA
SEMINOGRAMA POST-VASECTOMIA (perfil)	SEM_POSTV	SEMEN	Contenedor esteril boca ancha 100ml	Cód. barras blanco	CERHA	Andrología	Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA
SERINA	LSERIN	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
SERINA	SERINA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
SERINA	OSERIN	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
SERINA EN SANGRE SECA	SERIN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
SEROTONINA EN ORINA	OSEROTO	ORINA 24H ACIDA	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
SEROTONINA SERICA	SEROTO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
SIALOTRANSFERRINA	ASIALO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
SIALOTRANSFERRINA GLICOPROT. DEF. EN CARBOHIDRATOS (DCG)	CDG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	IBC (EXCLUSIVO PEDIATRIA)	Requiere autorización e informe clínico
SIALOTRANSFERRINA ISOFORMAS (PERFIL)	SIALO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
SIFILIS ACS TOTALES	SIFIGM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
SÍFILIS IGG EN LCR	SIFIG.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
SIFILIS IGM	SIFIM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
SÍFILIS IGM EN LCR	SIFIM.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
SÍLICA CLOTTING TIME (FÓRMULA)	SCT	SANGRE	(*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
SÍLICA CLOTTING TIME CONFIRM	SCTC	SANGRE	(*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
SÍLICA CLOTTING TIME SCREEN	SCTS	SANGRE	(*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL
SÍLICE EN AGUA	SILICE	AGUA DIALISIS	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
SÍNDROME DE ÁNGELMAN	FSV02	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
SINDROME DE CRI DU CHAT	FSV05	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
SÍNDROME DE LI-FRAUMENI (GEN p53)	MCA09	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
SÍNDROME DE MILLER-DIEKER	FSV06	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
SÍNDROME DE SMITH-MAGENIS	FSV08	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
SINDROME DE WILLIAMS	FSV04	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
SÍNDROME DE WOLF-HIRSCHHORN	FSV07	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
SÍNDROME DIGEORGE/VELOCARDIOFACIAL	FSV03	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
SÍNDROME PRADER WILLI/ANGELMAN	FSV01	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
SINTROM CONTROL	TP	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
SIROLIMUS (RAPAMICINA)	SIRO	Sangre EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	
SISTEMATICO DE ORINA/TIRA (PERFIL)	TIRA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
SITOSTEROL	E_SITOSTER	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
SO2- SATURACIÓN DE OXÍGENO	SO2.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
SODIO	NA	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
SODIO PERITONEAL DIALISIS	PNA.U	PER DIALIS	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
SODIO (GASOMETRÍA)	NA_G.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
SODIO EN 18 HORAS	ONA18	Orina de 18 horas	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
SODIO EN 24 HORAS	ONA24	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
SODIO EN HECES	NA_HECES	HECES	Conten.Heces 100ml	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
SODIO EN ORINA	ONA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
SODIO LCR	NALCR.U	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
SODIO LÍQUIDO BIOLÓGICO	NABIO.U	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
SOMATOMEDINA C (IGF-1)	IGF_1	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
SOMATOSTATINA	SOMATO	Plasma EDTA	(*)EDTA tubo especial APROTININA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	Requiere tubo especial de EDTA con APROTININA. Pedir en PREANALITICA 48924
SORDERAS DE ORIGEN MITOCONDRIAL	MSO03	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
SORDERAS LIGADAS A X	MSO04	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
SUBCLASES IGA (IGA1 / IGA2)	IGA_SUB	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS EN L.C.R.	SUBPOLCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS T / B /NK	SLINFOTBNK	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS T4 / T8	SLINFOT	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	SUBPOBLACIONES rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
SUBUNIDAD ALFA LIBRE	SUBALF	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
SUCCINILACETONA	A_SUCC	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
SUCCINILACETONA EN SANGRE SECA	SUCC_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
SUCCINILACETONA ORINA SECA	SUCC_OS	ORINA SECA	PAPEL CON ORINA seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	
SULFATOS CONJUGADOS EN ORINA	OSULFA	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
SULFONILUREA EN ORINA	SULFO_ORI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
SULFONILUREA EN SUERO	SULFO_SUE	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
SUSTANCIAS REDUCTORAS	SREDUC	HECES DE 24 HORAS	Cont.heces 24 H	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Contenedor para heces de boca ancha
t(14;20): IGH-MAFB	FSH40	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
t(1; 19) E2A-PBX1	FSH30	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
t(11;14):BCL-1-IGH	FSH07	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
t(12;21): ETV6/AML1	FSH10	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
t(14;16) REORDENAMIENTO MAF-IGH	FSH36	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
t(14;18):BCL2-IGH	FSH13	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
t(15;17): PML-RARA	FSH15	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
t(4;14) REORDENAMIENTO FGFR3-IGH	FSH35	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
t(8;14)MYC/IGH	FSH05	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
t(8;21): AM-1-ETO	FSH04	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
t(9; 22) BCR-ABL (DCDF)	FSH31	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
t(9;22):BCR-ABL	FSH06	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
T3 LIBRE	T3L	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
T3 REVERSE (TRIODOTIRONINA REVERSE)	RT3	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
T3 TOTAL (TRIODOTIRONINA TOTAL)	T3T	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
T4 LIBRE	T4L	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
T4 TOTAL (TIROXINA TOTAL)	T4T	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TACROLIMUS	TACRO	Sangre EDTA	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	Bioq.especial	
TALIO	TALIO	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
TALIO EN ORINA	OTALIO	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TAMIZ INHALANTES	PHATOP	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
TAO TRATAMIENTO ANTICOAGULACION ORAL URGENCIAS (PERFIL)	TAO.U	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
TAO TRATAMIENTO ANTICOAGULACION ORAL (PERFIL)	TAO	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
TAURINA	LTAU	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
TAURINA	TAURIN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TAURINA	OTAU	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TCO2- CO2 TOTAL	TCO2.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TELÓMERO A	FSV13	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
TELÓMERO B	FSV14	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
TELÓMERO C	FSV15	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
TELÓMERO D	FSV16	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
TELÓMERO E	FSV17	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
TELOPÉPTIDO	TELOPE	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TEOFILINA	TEOF	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TEST DE ISQUEMIA	ISQUEMIA	PLASMA	Tubo FLUORURO/OXALATO Tapón GRIS y Tubo GEL HEPARINA Tapón verde claro.	Número pequeño	HPS	Lab.Urgencias	Prueba funcional. Requiere CITA PREVIA LAB.HPS (46305). Tubo Fluoruro Oxalato tapón gris y tubo gel heparina de litio tapon verde. Dispensación automatica de tubos en sala de extracciones .

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
TEST ACTIVACIÓN BASÓFILOS (TAB)	TAB	SANGRE	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)	HOSPITAL	CACERES	Envío especial preparado por Alergia .Sangre EDTA mas medicamento a ensayar. Envío al INMUNOLOGÍA san Pedro de alcántara.
TEST DE ACTIVACIÓN TEMPRANA	TAT	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
TEST DE FAGOCITOSIS	FAGO	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
TEST DE GESTACION	GESTA	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
TEST DE GESTACIÓN (CERHA)	TGEST	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	CERHA	Andrología	Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA
TEST DE GLUCAGÓN PARA GLUCOSA (PERFIL)	T.GLUC.GLU	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	HOSPITAL	Lab.Central	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
TEST DE HOESCH PARA SCREENING PBG EN ORINA	HOESCH	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TEST DE KASPER	KASPER	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
TEST DE METILACIÓN	MSV04	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
TEST DE O' SULLIVAN GLUCOSA 50 G (PERFIL)	OSULLIVAN	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	HOSPITAL	Lab.Central	Las pruebas de SOG (curvas glucosa) requieren CITA PREVIA en el 46191. Extracción en el hospital Perpetuo Socorro
TEST DE QUIMIOTAXIS	QUIMIOTAX	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
TEST DE RESISTENCIA A ANTIRETROVIRALES	VRETRO	Plasma EDTA	(*)2 Tubos EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA
TEST DE SAICAR EN ORINA	SAICAR	ORINA (congelada)	(*) 2 Tubos 10 ml ORINA	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	IBC (EXCLUSIVO PEDIATRIA)	Requiere autorización e informe clínico. 20 ml minimo (2 tubos de muestra)
TEST DE SOG PARA GH	T.SOG.GH	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
TEST DE SULFITOS EN ORINAS	OSULFI	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
TEST DE TRANSFORMACIÓN LINFOBLÁSTICA	TTL	SANGRE	Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro	CITOGENETICA	HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
TEST SOBRECARGA CON BH4 (PERFIL)	BH4	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción
TESTOSTERONA 2ª MUESTRA	TEST.2M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
TESTOSTERONA LIBRE	TESTL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
TESTOSTERONA TOTAL	TEST	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
TETANOS IGG	TETANG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
THB- HEMOGLOBINA TOTAL	CTHB.U	SANGRE	Jeringa heparinizada	GASES blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TIAGABINA	TIAGAB	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TIEMPO DE OBTURACIÓN COLÁGEN ADP	PFAA	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
TIEMPO DE OBTURACIÓN COLÁGEN EPI	PFAE	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
TIGLIL CARNITINA C5:1	C5_1	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TIGLILGLICINA	A_TIGLIL	ORINA (congelada)	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis
TINCION DE GRAM (ASC)	GRAMAS.U	ASCITICO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TINCION DE GRAM (LCR)	GRAMLC.U	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TINCION DE GRAM (SINOV)	GRAMSI.U	SINOVIAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	SINOVIAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TINCION DE GRAM LÍQUIDO BIOLÓGICO	GRAMBI.U	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TINCION DE GRAM LIQUIDO PLEURAL	GRAMPL.U	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TINCION DE ZIEHL-NEELSEN	ZIEASC.U	ASCITICO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	ASCITICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TINCION DE ZIEHL-NEELSEN	ZIEPLE.U	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Número pequeño	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TINCION DE ZIEHL-NEELSEN	ZIESIN.U	SINOVIAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	SINOVIAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
TINCION DE ZIEHL-NEELSEN LCR	ZIELCR.U	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TINCION DE ZIEHL-NEELSEN LÍQUIDO BIOLÓGICO	ZIEBIO.U	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TIOPENTAL NIVELES EN SUERO	TIOPENTAL	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TIOPURINA METIL-TRANSFERASA	TIOPUR	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TIPAJE HLA DE DONANTE DE MÉDULA ÓSEA	HLA.DMO	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
TIROGLOBULINA	TIROG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	
TIROSINA	LTIROS	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
TIROSINA	TIROS	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TIROSINA	OTIROS	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TIROSINA MG/DL EN SANGRE SECA	TIR_C_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
TIROSINA (MG/DL) EN SANGRE SECA	TYR_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
TIROSINA EN SANGRE SECA	TIROS_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
TIROSINA EN SANGRE SECA MG/DL	TIROSI	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
TIROSINA ORINA SECA	TIROS_OS	ORINA SECA	PAPEL CON ORINA seca	Número pequeño	HOSPITAL	Metabolismo	
TITULO DE ANTI A/ANTI B	TANTIAB	SANGRE	EDTA 10ml BANCO Tapón violeta	Número pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
TOBRAMICINA	TOBRA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TOPIRAMATO	TOPIR	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TOXINA BOTULÍNICA DETECCIÓN EN SUERO	TOX_BOTULI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TOXOCARA CANIS IGG	CANISG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
TOXOPLASMOSIS IGG	TOXOG	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
TOXOPLASMOSIS IGG EN LCR	TOXOG.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
TOXOPLASMOSIS IGM	TOXO_M	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
TOXOPLASMOSIS IGM	TOXOM	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
TP MEZCLA 37º	MPTI	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
TP MEZCLA MANUAL	MTP	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
TP MEZCLA PP+PC	TPM	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
TP RATIO	TPRA	SANGRE	Tubo CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
TRANSFERRINA	TRANS	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
TRANSFERRINA DEFIC.CARBOHIDRATOS (CDT)	CDT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TRANSFERRINA EN ORINA	OTRANF	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Proteina/marcadores	
TRANSFERRINA TOTAL	TCDT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TREONINA	LTREON	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
TREONINA	TREONI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TREONINA	OTREON	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TRH TEST	TESTTRH	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
TRICLORURO EN AGUA DIÁLISIS	TRICLOR	AGUA DIALISIS	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TRIGLICERIDOS	TRIG	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
TRIGLICERIDOS (ASC)	TRIASC	ASCITICO	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	ASCITICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
TRIGLICERIDOS PERITONEAL DIALISIS	TRIPER	PER DIALIS	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TRIGLICERIDOS (PLE)	TRIPLE	PLEURAL	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	PLEURAL blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TRIGLICERIDOS EN L. BIOLÓGICO	TRIBIO	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLÓGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TRIMETILAMINURIA (OLOR A PESCADO). GEN FMO3	GEN_FMO3	SANGRE	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere autorización e informe clínico
TRIPSINA	TRIP	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TRIPSINA INMUNOREACTIVA	NIRT	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
TRIPTASA SÉRICA	TRIPTA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Alergia	
TRIPTÓFANO	LTRIP	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
TRIPTÓFANO	TRIPT	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TRIPTÓFANO	OTRIP	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
TRIPTOFANO EN SANGRE SECA	TRYPTO_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
TRIQUEINA	TRIQUI	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
TROMBOFILIA (PERFIL)	TROMBO	SANGRE	(*5 Tubos CITRATO Tapón AZUL	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 5 tubos de CITRATO AZUL
TROPISMO VIH	TROPIVIH	Plasma EDTA	(*2 Tubos EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA
TROPONINA I CARDIACA	TROP_I.U	SUERO	Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro	SUERO blanca (urgencias)	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Urgencias	Solicitar en volante de urgencias y extraer sangre en tubo verde de heparina de litio con gel.También SUERO AMARILLO CENTRAL
TROPONINA LÍQUIDO BIOLÓGICO	TNIBIO.U	L.Biológico	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLÓGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
TSH	TSH	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
TSH NEONATAL	NTSH	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
TSH 15 MINUTOS	TSH15	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
TSH 60 MINUTOS	TSH60	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
TSH A LOS 120 MINUTOS	TSH120	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
TSH A LOS 180 MINUTOS	TSH180	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
TSH A LOS 30 MINUTOS	TSH30	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
TSH A LOS 90 MINUTOS	TSH90	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	Número pequeño	HOSPITAL	Hormonas	Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo
TTPA CON CONTACTO PROLONGADO	TTPK	SANGRE	Tube CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
TTPA MEZCLA 37º	TTPi	SANGRE	Tube CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
TTPA MEZCLA MANUAL	MPTT	SANGRE	Tube CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
TTPA MEZCLA PP+PC	TTPM	SANGRE	Tube CITRATO Tapón AZUL	COAGULACIÓN azul	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
UREA	URE	SUERO	Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
UREA	UREA	SUERO	Tube suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
UREA	OUREA	ORINA AISLADA	Tube 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
UREA PERITONEAL DIALISIS	PUREA.U	PER DIALIS	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	Cód. barras blanco	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
UREA EN 18 HORAS	OURE18	Orina de 18 horas	Tube 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
UREA EN 24 HORAS	OURE24	ORINA 24 HORAS	Tube 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
UREA EN ORINA	OURE	ORINA AISLADA	Tube 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
UREA LÍQUIDO BIOLÓGICO	UREBIO.U	L.Biológico	Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril	BIOLOGICO blanca	HOSPITAL	Lab.Urgencias	
UROBILINOGENO TIRA DE ORINA	UROB	ORINA AISLADA	Tube 10 ml orina	ORINA anaranjado	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
UROPORFIRINAS URINARIAS	UROPOR	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Hormonas	Orina de 24 horas protegida de la luz. La muestra de orina debe protegerse de la luz con papel aluminio. Indicar diuresis
V.COXACKIE A FC	VCOXA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
V.COXACKIE B FC	VCOXB	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VALINA	LVALIN	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	Metabolismo	
VALINA	VALIN	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
VALINA	OVALIN	ORINA AISLADA	Tubo 10 ml orina	BIORIN amarilla	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
VALINA EN SANGRE SECA	VALIN_SS	SANGRE SECA	PAPEL sangre seca	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
VANCOMICINA	VANCO	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	Bioq.especial	
VARIANTES DE HEMOGLOBINA (PERFIL)	HEMOGPT	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel
VARIANTES FUNCIONALES DEL GEN DE LA IL-28B	MI01	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	DIAG.MOL/HLA rosa	C.SALUD/HOSPITAL	INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA	
VARICELA IGG	VZVG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VARICELA IGG EN LCR	VZVG.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VARICELA IGM	VZVM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VASOPRESINA	VASOP	Plasma EDTA congelado	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	Paciente en posición supina y relajado 60 minutos antes de la extracción.Separar plasma y congelar inmediato
VCM	VCM	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
VDRL	RPR	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VDRL EN LCR	RPR.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VELOCIDAD DE SEDIMENTACION	V	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMO+VSG	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
VIA EXTRÍNSECA (PERFIL)	VIAE	SANGRE	(*4 Tubos CITRATO Tapón AZUL	Numero pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 4 tubos de CITRATO AZUL
VIA INTRÍNSECA (PERFIL)	VIAI	SANGRE	(*4 Tubos CITRATO Tapón AZUL	Numero pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 4 tubos de CITRATO AZUL
VIH	VIH	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
VIH1+VIH2 WESTERN BLOT	WBVIH	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS CHIKUNGUNYA IGG	CHIKUG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS CHIKUNGUNYA IGM	CHIKUM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS COXACKIE A EN LCR	VCOXA.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS COXACKIE B EN LCR	VCOXB.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS DE LA CORIOMENINGITIS LINFOCITICA	LCMV_RNA	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	REFERENCE	
VIRUS DENGUE IGG	DENG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS DENGUE IGM	DENM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS EPSTEIN BARR ANTÍGENO NUCLEAR IGG	EBNA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS EPSTEIN BARR CÁPSIDE IGG	EBVG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS EPSTEIN BARR CÁPSIDE IGG EN LCR	EBVG.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS EPSTEIN BARR CÁPSIDE IGM	EBVM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS HEPATITIS D (VHD) ANTICUERPOS IGG	ACVDG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
VIRUS HEPATITIS D (VHD) ANTICUERPOS IGM	ACVDM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
VIRUS HEPATITIS D (VHD) ANTÍGENO DELTA	AGVDELTA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
VIRUS HEPATITIS E ANTICUERPOS IGG	VHEG	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
VIRUS HEPATITIS E ANTICUERPOS IGM	VHEM	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
VIRUS HERPES SIMPLE TIPO 6 IGM	VHS6M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS HERPES TIPO 1 IGG	VHS1G	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS HERPES TIPO 1 IGG EN LCR	VHS1G.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS HERPES TIPO 1 IGM	VHS1M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS HERPES TIPO 1 IGM EN LCR	VHS1M.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS HERPES TIPO 1/2 IGM	VHS12M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS HERPES TIPO 2 IGG	VHS2G	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS HERPES TIPO 2 IGG EN LCR	VHS2G.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS HERPES TIPO 2 IGM	VHS2M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS HERPES TIPO 2 IGM EN LCR	VHS2M.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS HERPES TIPO 6 IGG	VHS6G	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS HERPES TIPO 6 IGG EN LCR	VHS6G.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS HERPES TIPO 8 IGG	VHS8G	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS HERPES TIPO 8 IGG EN LCR	VHS8G.LCR	L.C.R.	Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril	LCR blanco	HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VIRUS HERPES TIPO 8 IGM	VHS8M	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
VITAMINA A	VITA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
VITAMINA B1	VITB1	SANGRE TOTAL (EDTA)	(*2 Tubos EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA
VITAMINA B12	VB12	SUERO	Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO	SUERO CENTRAL	C.SALUD/HOSPITAL	Lab.Central	
VITAMINA B2	VITB2	SANGRE TOTAL (EDTA)	(*2 Tubos EDTA Tapón ROSA	Número pequeño	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA
VITAMINA B3	VITB3	SUERO CONGELADO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
VITAMINA B6	VITB6	Plasma EDTA congelado	(*2 Tubos EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	Requiere 2 tubos de EDTA
VITAMINA C	VITC	Plasma EDTA congelado	(*Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	HOSPITAL	REFERENCE	Requiere preparación específica de la muestra. AVISAR PREVIAMENTE en PREANALITICA (48924)
VITAMINA E	VITE	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
VITAMINA K	VITK	SUERO CONGELADO	(* 2 Tubos suero Tapón ROJO 10ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Requiere 2 tubos de suero rojo (mínimo 3 ml suero)
VON WILLEBRAND ESTUDIO (PERFIL)	EVW	SANGRE	(*4 Tubos CITRATO Tapón AZUL	Numero pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 4 tubos de CITRATO AZUL
VON WILLEBRAND INTRINSECA ESTUDIO (PERFIL)	IVW	SANGRE	(*4 Tubos CITRATO Tapón AZUL	Numero pequeño	HOSPITAL	HEMATOLOGIA	Se requieren 4 tubos de CITRATO AZUL
VPM	VPM	SANGRE	EDTA 5ml Tapón VIOLETA	HEMOGRAMA violeta	C.SALUD/HOSPITAL	HEMATOLOGIA	
XILOSA EN SUERO A LAS 2 HORAS TRAS SOBRECARGA ORAL .	XILOSA	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	
YERSINIA ENTEROCOLÍTICA FC	YER	SUERO	Tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	MICROBIOLOGIA	
YODO EN ORINA	YODURO	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
ZINC	ZN	SUERO	Tubo suero Tapón AZUL oscuro	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Requiere tubo especial con silicona Trace tapón AZUL oscuro
ZINC EN AGUA DIÁLISIS	ZN_AGUA	AGUA DIALISIS	Conten/tubo plastico	Cód. barras blanco	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	
ZINC EN ORINA	OZINC	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
ZINC EN ORINA DE 24 HORAS	OZINC24	ORINA 24 HORAS	Tubo 10 ml orina	BIORIN +DIURESIS	C.SALUD/HOSPITAL	Metabolismo	Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra.
ZN PROTOPORFIRINAS EN SANGRE	ZNPROT	SANGRE TOTAL (EDTA)	Tubo EDTA Tapón ROSA	OTROS (EDTA)rosa	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	

DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA	CODIGO PRUEBA	MUESTRA	TUBO	ETIQUETA	EXTRACCIÓN	LABORATORIO	COMENTARIO
ZONISAMIDA	ZONI	SUERO	tubo suero Tapón ROJO 10 ml	SUERO ESPECIAL	C.SALUD/HOSPITAL	REFERENCE	